

pH-neutral mit pH-Wert zwischen
6 und 8
und
der einzige Saugleitungsreiniger,
der für den NXT Hg5 Amalgam-
abscheider empfohlen wird

Anwendungshinweise

Solmetex empfiehlt eine tägliche Reinigung Ihrer Saugleitungen

1. Drehen Sie die PowerScrub-Flasche um, um den Dosieraufsatz zu füllen.
2. Kippen Sie die Flasche wieder zurück, um das überschüssige Konzentrat abzugießen und füllen Sie die gewünschte Konzentratmenge wie nachfolgend beschrieben in die PowerScrub-Dispenserflasche:

Für 1 Behandlungseinheit:

Messen Sie 1 Flüssigunze des Konzentrats ab und mischen Sie es mit 1 000 ml (32 oz) Wasser.

Für 2 Behandlungseinheiten:

Messen Sie 2 Flüssigunzen des Konzentrats ab und mischen Sie es mit 2000 ml (64 oz) Wasser.

3. Schließen Sie die Saugleitungen an der Dispenserflasche an und saugen Sie pro Behandlungseinheit 1 000 ml (32 oz) der Reinigungslösung ab. Die in der Dispenserflasche verbleibende Reinigungslösung kann in das Speibecken geschüttet werden.

Erste Anwendung: Verwenden Sie für die ersten 2 Reinigungen die halbe Menge des Konzentrats (0,5 oz) auf 32 oz (1 000 ml) Wasser pro Behandlungseinheit, um die angesammelten Ablagerungen nach und nach aus den Saugleitungen zu entfernen. Verwenden Sie bei den nachfolgenden Reinigungen die normale Dosierung wie oben angegeben.

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wirkt bei Einnahme gesundheitsschädlich. Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung vermeiden. Tragen Sie eine Schutzbrille, Handschuhe und Schutzkleidung.

ERSTE HILFE: Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut muss die betroffene Stelle sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausgespült werden. Bei Verschlucken muss umgehend ein Arzt oder der Giftnotruf kontaktiert werden. Die vollständigen Sicherheitsinformationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Unbedenklich für die Umwelt und Abwassersysteme. Nicht entflammbar. Vor Frost schützen.

BESSER REINIGEN • BESSER SPÜLEN • BESSER BEHANDELN

- Smart-Foam-Technologie – Lang anhaltende Reinigungswirkung
- Mikrobielle Formel für optimale Funktion der Auffangbehälter
- Entfernt Ablagerungen in Saugleitungen zuverlässig bei Kontakt
- Ungefährlich für Behandelnde, Behandelte und die Umwelt – ohne aggressive Chemikalien
- Setzt bei jeder Wassertemperatur mikrobielle Reinigungsenzyme frei
- Erfüllt alle EPA-Vorgaben für Zahnarztpraxen – pH-neutral mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
- Geeignet für Nass- und Trockenabsaugung
- Für alle Amalgamabscheider geeignet
- Wandelt schädliches Quecksilber mit Mereduze in organisches Quecksilber um

Wenn Sie PowerScrub™ bei der Reinigung Ihres NXT Hg5 verwenden, verlängern wir Ihre Garantie auf 5 Jahre!