

du Contenant de Collecte Hg5®

Procédure de Remplacement et de Recyclage

Séparateur d'amalgame Hg5®

Votre contenant de collecte **doit être remplacé tous les douze (12) mois ou lorsque le niveau de sédiments atteint la ligne plein, selon la première éventualité**. Vérifiez le niveau de sédiments du contenant de collecte chaque semaine.



← Contenant
de Collecte


AVERTISSEMENT

Le flux de déchets traité par le Hg5® provient d'un système d'aspiration dentaire et peut donc contenir des concentrations de mercure et d'argent sous forme solide et soluble.

- Portez toujours un équipement de protection lors de la manipulation des contenants de collecte Hg5® pleins (gants de latex, lunettes de sécurité ou écran facial) et éliminez-les conformément aux règlements et codes locaux.
- Les contenants de collecte pleins doivent être manipulés, entreposés et éliminés conformément aux règlements applicables aux déchets dangereux contenant du mercure.
- Tout déversement doit être considéré comme dangereux et traité conformément aux procédures normalisées de manipulation des matières dangereuses.

Contenu de la Trousse de Recyclage

- Un (1) guide d'instructions pour le contenant de collecte Hg5
- Un (1) contenant de collecte Hg5
- Deux (2) embouts d'emballage recyclables
- Un (1) couvercle encliquetable
- Un (1) sac de recyclage en plastique
- Une (1) boîte d'expédition pour recyclage
- Une (1) bande de ruban d'emballage de 15 po
- Deux (2) bandes de ruban d'emballage de 6 po
- Une (1) enveloppe pour bordereau d'expédition de retour


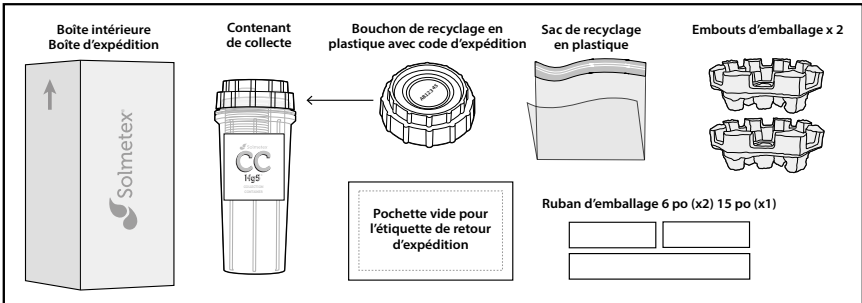
**IMPORTANT**

Laissez le système d'aspiration fonctionner pendant toute la procédure de remplacement du contenant de collecte.

- Si vous utilisez un système d'aspiration à vitesse variable, consultez le guide d'utilisation du fabricant. Assurez-vous qu'au moins une valve d'aspiration est ouverte et que le système d'aspiration est en fonction avant de remplacer le contenant de collecte.
- Cette procédure doit être effectuée uniquement lorsqu'aucune salle opératoire n'est utilisée, puisqu'une perte d'aspiration au fauteuil pourrait se produire.
- Notez la lecture du manomètre d'aspiration avant de remplacer le contenant de collecte, puisque cette lecture devrait demeurer inchangée après le remplacement du contenant de collecte.

Retrait du contenant de collecte usagé




1. **Conservez la boîte intérieure et les embouts d'emballage pour le retour de votre contenant de collecte plein.**
2. Retirez le nouveau contenant de collecte de la boîte intérieure. **En laissant le système d'aspiration en marche**, retirez le contenant de collecte plein du système Hg5® comme suit:
 - a. Soutenez le contenant de collecte d'une main tout en retirant les goupilles de retenue de l'autre main.
 - b. Inclinez le contenant de collecte sur le côté pour relâcher le vide, puis tirez-le vers le bas pour le retirer.

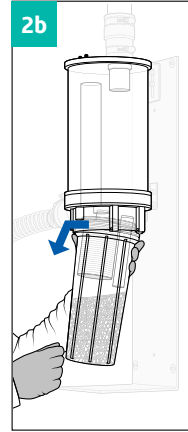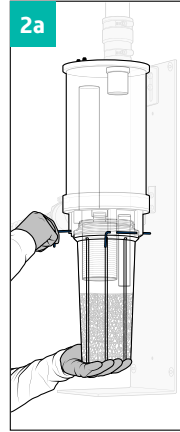

Installer le nouveau contenant de collecte:

3. **Pendant que le système d'aspiration fonctionne toujours**, installez votre nouveau contenant de collecte:

- a. Le contenant de collecte ne peut être installé que dans un seul sens. Notez l'alignement des raccords du contenant avec les ouvertures réceptrices de l'unité supérieure.

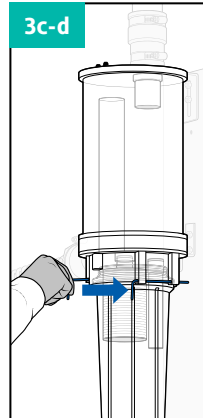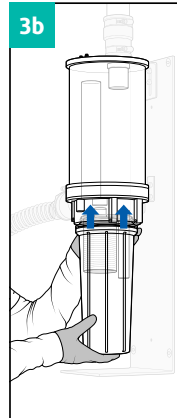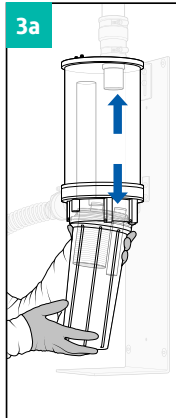

- b. Insérez doucement les raccords dans les ouvertures réceptrices. Cela peut être accompli en balançant légèrement le contenant de collecte. Les joints toriques des raccords devraient s'insérer facilement dans les récepteurs de l'unité supérieure.
- c. Continuez à pousser le contenant de collecte dans l'unité supérieure jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
- d. Insérez les goupilles de retenue dans leurs ouvertures jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. Le contenant de collecte est maintenant verrouillé.

4. Remplissez les renseignements sur l'étiquette:
 - a. Inscrivez la "Date d'installation" sur le nouveau contenant de collecte.
 - b. Inscrivez la "Date du prochain remplacement" sur le nouveau contenant de collecte.
5. La lecture du manomètre devrait être identique après le remplacement du contenant de collecte.

La lecture du vacuomètre devrait être la même après le remplacement du contenant de collecte.


Recycler le contenant de collecte

IMPORTANT

Repérez et notez le "code d'expédition" situé sur le couvercle encliquetable avant d'emballer le contenant. Il sera requis pour obtenir l'étiquette de retour d'expédition UPS.


AVERTISSEMENT ⚠

Emballer et expédier immédiatement le contenant de collecte afin d'éviter tout risque de fuite ou d'exposition aux déchets.

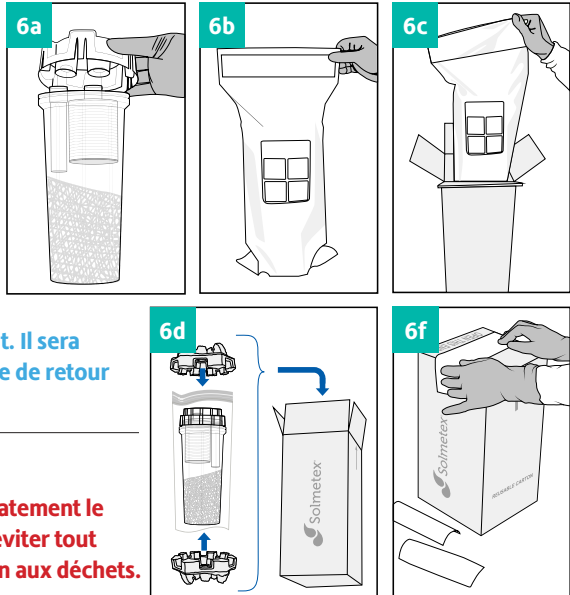

6. Scellage et emballage sécuritaire pour l'expédition:

- a. Alignez le couvercle encliquetable avec les buses du contenant de collecte. Appuyez fermement afin de verrouiller le couvercle en place.
- b. Placez le contenant de collecte plein dans le sac de recyclage en plastique fourni. Suivez les instructions indiquées sur le sac pour assurer une fermeture étanche empêchant les fuites pendant l'expédition.
- c. Placez le sac de plastique dans l'embout inférieur d'emballage et insérez-le dans la boîte d'expédition.
- d. Placez l'embout d'emballage supérieur sur le couvercle encliquetable afin de sécuriser le contenant dans la boîte pour l'expédition.
- e. Fermez la boîte de retour et préparez-la pour l'expédition.
- f. À l'aide d'une éponge humide, mouillez soigneusement la bande de ruban d'emballage de 15 po et appliquez-la sur la couture centrale. Mouillez également chaque bande de ruban de 6 po et appliquez-les sur les coutures des extrémités de la boîte afin d'assurer une fermeture hermétique.

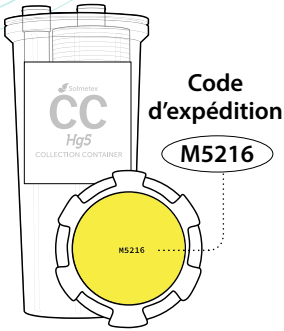

Nous vous recommandons d'inscrire ce code à l'extérieur de la boîte d'expédition.

Instructions relatives à l'étiquette d'expédition:

Ayez votre "Code d'expédition" à portée de main. Il s'agit du numéro unique figurant sur le couvercle supérieur de l'ancien contenant de collecte, qui a été noté avant que la boîte ne soit scellée. Si vous ne disposez pas de cette information, communiquez avec notre service à la clientèle par clavardage au Solmetex.com ou par téléphone au 1.800.216.5505.



Avant de commencer: Votre étiquette UPS s'affichera dans une nouvelle fenêtre. Assurez-vous que votre navigateur autorise les fenêtres contextuelles (pop-ups) provenant de ce site ou désactivez votre bloqueur de fenêtres contextuelles avant de poursuivre.

1. Visitez www.solmetex.com et cliquez sur le bouton "Étiquette d'expédition pour le recyclage" sur la page d'accueil. Vous serez ensuite dirigé vers le portail de conformité.
2. Connectez-vous au portail de conformité et repérez l'option "Imprimer l'étiquette d'expédition" à l'écran. Si c'est votre première connexion au portail, mais que votre cabinet possède déjà un compte, suivez les instructions pour "Enregistrer" votre nouveau compte utilisateur. C'est simple ! Si votre cabinet est nouveau chez Solmetex, communiquez avec le service à la clientèle (par clavardage ou par téléphone) afin de créer votre accès au portail. Vous aurez besoin d'un compte pour télécharger vos certificats de recyclage.
3. Dans le portail, cliquez sur "Print Recycling Label", situé du côté gauche de l'écran.
 - a. Sélectionnez le type de produit et saisissez le code d'expédition situé sur le couvercle, puis cliquez sur "Soumettre".
4. Votre étiquette d'expédition UPS s'affichera. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que les bloqueurs de fenêtres contextuelles sont désactivés.
5. Imprimez l'étiquette UPS, insérez-la dans l'enveloppe pour bordereau d'expédition fournie, retirez la pellicule protectrice de l'enveloppe et apposez-la sur la boîte pour le ramassage par UPS, ou **appelez UPS au 1-800-742-5877 pour planifier un ramassage GRATUIT de ce colis.**



Remarque: Les étiquettes d'expédition UPS sont associées au Code d'expédition unique de votre contenant de collecte et ne peuvent pas être réutilisées pour d'autres envois. Toute discordance entre les étiquettes et le contenu expédié pourrait avoir une incidence sur vos documents de conformité aux exigences de l'EPA.

Accéder à vos certificats de recyclage:

- Pour accéder à votre certificat de recyclage, visitez solmetex.com et cliquez sur le lien vers le portail de conformité dans la barre de menu.
- Connectez-vous au portail à l'aide de votre adresse courriel et de votre mot de passe, puis sélectionnez l'onglet (Certificats de recyclage). À partir de cette section, vous pourrez consulter, imprimer, télécharger et enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur.

Veuillez noter que le traitement des certificats de recyclage peut prendre jusqu'à 45 jours à compter de la date d'expédition au recycleur.

Pour en savoir plus:

- Appelez Solmetex au **800.216.55**
- ou clavardez en direct avec nous sur solmetex.com
- Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h HNE



Pour obtenir les manuels dans d'autres langues, veuillez visiter solmetex.com ou numériser le code.

En 1999, Solmetex a conçu le Hg5, qui est rapidement devenu la norme de l'industrie en matière de séparation d'amalgame. Nous possédons une vaste expérience en chimie de l'eau, en science de séparation chimique, en ingénierie des procédés, en fabrication haute performance, ainsi qu'en réglementation fédérale, étatique et locale concernant l'eau et les déchets dangereux. La gamme de produits Solmetex offre une véritable "Solution Complète" écologique pour la gestion et le recyclage des déchets dentaires. La série Solmetex NXT Hg5 est le chef de file mondial et la référence en matière de séparation d'amalgame haute performance.

Registre d'Inspection Visuelle

Solmetex recommande une inspection hebdomadaire de votre séparateur d'amalgame de série Hg5. Utilisez ce registre afin d'assurer un fonctionnement et un entretien adéquats. Inspectez visuellement le contenant de collecte chaque semaine afin de déterminer le niveau de déchets solides. Il est temps de remplacer le contenant lorsque les solides atteignent la ligne "plein" ou après un an, selon la première éventualité.

Nom du cabinet: _____

Numéro de compte: _____

Date (MM/JJ/AAAA)	Signature

Téléchargez, imprimez et affichez ce registre près de votre séparateur d'amalgame NXT Hg5 afin d'assurer le suivi de l'entretien hebdomadaire.

Pour télécharger: www.solmetex.com/visualinspectionlog

©2026 Solmetex, LLC. Solmetex_HG5 CC Replacement_DTL-264_SXD-MKT-IFU-23Rev1_FR-CA

