



Instructions sur la mise à niveau




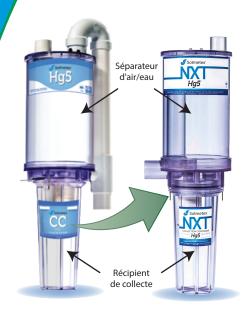

Pourquoi ai-je besoin d'une trousse de remplacement de pièces?

Bonne question. Solmetex offre maintenant les pièces nécessaires pour la mise à niveau du séparateur d'amalgame Hg5 vers le séparateur d'amalgame NXT Hg5 sans devoir retirer ou remplacer la plaque de fixation murale. Grâce aux pièces fournies, vous pouvez garder la plaque de fixation sur le mur et changer seulement le support, les vis, les écrous et les boulons afin d'installer votre nouveau séparateur d'amalgame NXT Hq5. C'est si facile!

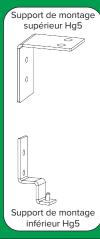

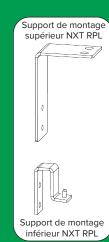

PROCÉDURE:


- 1. Inspectez le séparateur d'air/eau Hq5 pour vous assurer qu'il ne contient pas de résidus liquides. S'il contient des résidus liquides, communiquer avec Solmetex pour des informations supplémentaires.
- 2. S'il n'y a pas de résidus liquides dans le séparateur d'air/eau, alors que l'aspirateur est en marche, détachez le récipient de collecte Hg5 du séparateur d'air/eau Hg5 en enlevant les goupilles de retenue et en inclinant le récipient afin de briser le joint hermétique.
 - 3. Préparez le récipient de collecte Hg5 pour le recyclage en fixant le bouchon en plastique sur le récipient de collecte Hq5 et placez-le dans le sac d'expédition du récipient de collecte de la série Hg5 puis scellez-le conformément aux instructions affichées sur le sac. Pour terminer, placez le sac dans la boîte de la trousse de recyclage.
 - 4. Ensuite, fermez l'aspirateur et détachez le tuyau d'aspiration de l'orifice d'entrée et de sortie du séparateur d'air/eau.
 - 5. En utilisant une clé 7/16 po, desserrez les écrous supérieurs du support supérieur.
 - 6. Levez le support vers le haut et enlevez le séparateur d'air/eau de la plaque de fixation et placez-le dans le sac de plastique fourni. Scellez le sac selon les instructions spécifiées sur le sac.




Félicitations pour votre mise à niveau vers la dernière technologie en matière de séparation d'amalgame

7. Ensuite, enlevez le support supérieur et inférieur de la plaque de fixation murale, par contre, assurez-vous de laisser les vis en place.

- 8. Fixez d'abord le support inférieur sur le nouvel adaptateur NXT en serrant et fixant les écrous.
- 9. Réglez les vis de façon à attacher le support supérieur. Placez les écrous sur le support sans les serrer complètement.
- 10. Montez le nouveau séparateur d'air/eau NXT Hg5 sur le support inférieur.
- 11. Ensuite, alignez-le avec le support supérieur en insérant les languettes en caoutchouc dans les trous des supports. Serrez tous les écrous dans le support supérieur.
- 12. Rattachez les tuyaux d'aspiration au séparateur d'air/eau.
- 13. Insérez le nouveau récipient de collecte NXT Hg5 dans le séparateur d'air/eau et fixez-le en place avec les goupilles de retenue.
- 14. Redémarrez l'aspirateur.
- 15. Pour terminer, recyclez l'ancien séparateur d'air/eau Hg5 et le récipient de collecte Hg5.Pour les procédures de recyclage et d'élimination, référez-vous à votre détaillant.

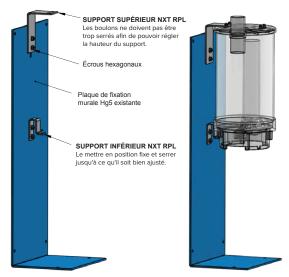

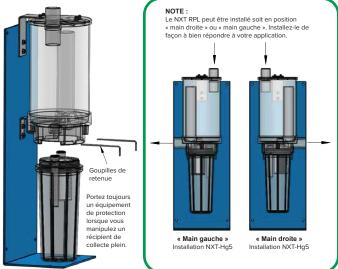



www.solmetex.com 1.800.216.5505