

# Instrucciones de cambio

Separador de amalgama Hg5 → Separador de amalgama NXT Hg5



## ¿Por qué necesito este kit de repuesto de hardware?

Buena pregunta. Solmetex está ahora proporcionando el hardware necesario para cambiar el viejo separador de amalgama Hg5 por el nuevo separador de amalgama NXT Hg5 sin tener que remover ni reemplazar la placa trasera azul. Con el hardware proporcionado, puede mantener la placa trasera existente en la pared y cambiar únicamente el soporte, los tornillos, las tuercas y los pernos para instalar su nuevo separador de amalgama NXT Hg5. ¡Es así de fácil!

Soporte de montaje superior del Hg5



Soporte de montaje inferior del Hg5


Soporte de montaje superior del NXT RPL



Soporte de montaje inferior del NXT RPL

## PROCEDIMIENTO:

1. Inspeccione el separador de aire y agua del Hg5 para asegurarse de que no hay residuo de líquido en él. Si hay residuo de líquido presente, comuníquese con Solmetex para obtener instrucciones.
2. Si no hay residuo de líquido presente en el separador de aire y agua, entonces con la aspiradora en funcionamiento, desmonte el contenedor de recolección del Hg5 al remover los pasadores de retención e inclinar el contenedor para romper el sello de la aspiradora.
3. Prepare el contenedor de recolección del Hg5 para reciclaje al tirar de la tapa de plástico en el contenedor de recolección del Hg5 y colocarla en la bolsa de envío del contenedor de recolección de la serie Hg5 y sellarla de acuerdo con las instrucciones de la bolsa. Finalmente, coloque la bolsa en una caja de kit de reciclaje.
4. Después, apague la aspiradora y desmonte la manguera del puerto de entrada y del puerto de salida del separador de aire y agua.
5. Usando una llave de 7/16", afloje las dos tuercas superiores en el soporte superior.
6. Levante el soporte, remueva el separador de aire y agua de la placa trasera de muro, colóquelo en la bolsa de plástico que le fue proporcionada y séllela de acuerdo con las instrucciones de la bolsa.

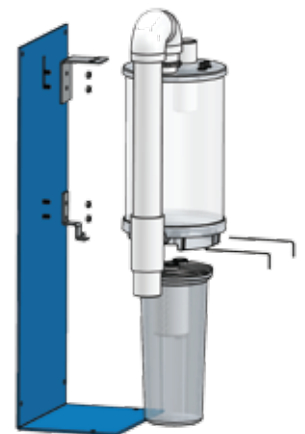

# Enhorabuena por su mejora a la tecnología más reciente en separación de amalgama

7. A continuación, remueva el hardware del soporte superior e inferior de la placa trasera, asegurándose de que los tornillos se mantengan en su lugar.

8. Tome el nuevo hardware de adaptador del NXT y fije el soporte inferior primero, apretando y asegurando las tuercas.

9. Ajuste los tornillos para fijar el soporte superior y ponga las tuercas, pero no las apriete completamente.

10. Monte el nuevo separador de aire y agua del NXT Hg5 en el soporte inferior.


11. Después, alinee el soporte superior al insertar las lengüetas de goma en los orificios del soporte y apriete todas las tuercas en el soporte superior.

12. Vuelva a instalar las mangueras de la aspiradora en el separador de aire y agua.


13. Inserte el nuevo contenedor de recolección NXT Hg5 en el separador de aire y agua y asegúrelo en su lugar usando los pasadores de retención.

14. Vuelva a poner en funcionamiento la aspiradora.

15. Finalmente, recicle el separador de aire y agua del Hg5 antiguo y recicle el contenedor de recolección del Hg5. Consulte con su distribuidor para obtener información sobre procedimientos de reciclaje y desecho.

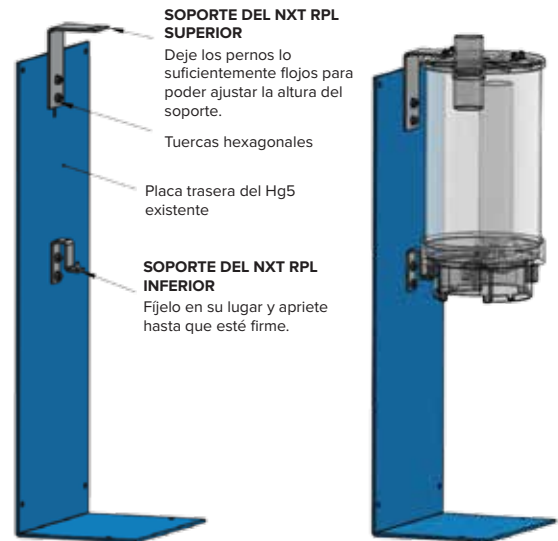

**NOTA:** El NXT RPL puede ser instalado en una posición "para mano derecha" o "para mano izquierda". Instale como mejor se adapte a su aplicación.

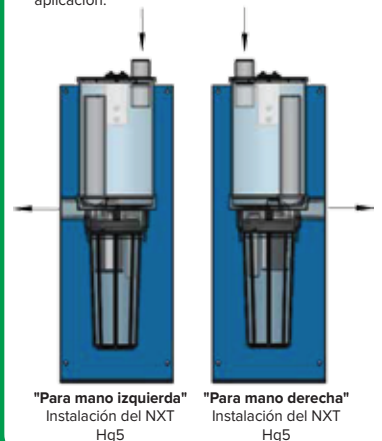

 **Solmetex™**  
El líder destacado en separación de amalgam