




Vor dem Anschließen Ihres neuen NXT Hg5 Amalgamabscheiders

Mit einem pH-Wert von 7 ist PowerScrub der einzige Saugleitungsreiniger, der für den NXT Hg5 Amalgamabscheider empfohlen wird.

Bevor Sie die Saugleitungen zur Installation Ihres neuen Amalgamabscheiders trennen, ist es wichtig, dass die Leitungen frei von Ablagerungen sind. Durch das Trennen der Saugleitungen bei der Installation gelangt Luft in die Schläuche, wodurch sich angesammelte Ablagerungen lösen können. Dies kann möglicherweise dazu führen, dass sich Ihr Amalgamabscheider vorzeitig füllt.

Solmetex empfiehlt Ihnen, vor der Installation Ihres NXT Hg5 Ihre Saugleitungen einen Monat lang gründlich mit dem PowerScrub-Saugleitungsreiniger zu reinigen. Bitte befolgen Sie für die ersten beiden Reinigungszyklen unbedingt die Anweisungen für die Erstanwendung und führen Sie die nachfolgenden Reinigungen entsprechend den Anwendungshinweisen durch. Dieser einmonatige Reinigungsvorgang hilft, die Menge der angesammelten Ablagerungen zu reduzieren, die sich derzeit noch in Ihren Leitungen befinden.

Saubere Saugleitungen gewährleisten, dass das Absaugsystem sicher und voll funktionsfähig ist. Eine ordnungsgemäße Wartung erfordert nur einen geringen Zeitaufwand. Bei Verwendung der richtigen Reinigungsprodukte bleiben die Saugleitungen frei von Ablagerungen, der Saugstrom wird nicht unterbrochen, und die Patienten erhalten die bestmögliche Versorgung.

 Solmetex™ empfiehlt den PowerScrub-Saugleitungsreiniger mit praktischer Dispenserflasche für alle Amalgamabscheider der Hg5-Reihe.