



Prima di installare il nuovo separatore d'amalgama NXT Hg5

Con un vero pH di 7, PowerScrub è l'unico aspirapolvere per linee del vuoto consigliato per il separatore di Amalgama NXT Hg5.

Prima di interrompere le linee di aspirazione con l'installazione del nuovo separatore d'amalgama, è importante che le linee siano prive di accumulo di detriti. L'interruzione delle linee di aspirazione durante l'installazione introdurrà aria nelle linee facendo fuoriuscire i residui accumulati. L'interruzione può potenzialmente provocare il riempimento prematuro del separatore ad amalgama.

Per un mese prima dell'installazione di NXT Hg5, Solmetex raccomanda di pulire accuratamente le linee di aspirazione utilizzando PowerScrub Vacuum Line Cleaner. Assicuratevi di attenervi alle istruzioni per il primo uso e le prime due pulizie e quindi per quelle successive segui quanto indicato. Questa procedura di un mese dovrebbe consentire di ridurre la quantità di residui accumulati nelle linee.

Le linee di evacuazione pulite assicurano che le linee di aspirazione siano sicure e completamente funzionanti. Una corretta manutenzione richiede solo un piccolo investimento di tempo con l'uso dei prodotti di pulizia corretti, le linee di aspirazione rimangono libere dall'accumulo di detriti, il flusso di aspirazione non si interrompe e i pazienti ricevono il servizio migliore possibile.

 Solmetex™ consiglia PowerScrub Vacuum Line Cleaner e il dispenser Sidekick per tutti i separatori ad amalgama della serie Hg5.