




## Antes de instalar su nuevo separador de amalgama NXT Hg5

Con un pH real de 7, PowerScrub es el único limpiador de líneas de aspiradoras recomendado para el separador de amalgama NXT Hg5.

Antes de interrumpir sus líneas de aspiración para instalar su nuevo separador de amalgama, es importante que las líneas no tengan residuos acumulados. La apertura de las líneas de aspiración durante la instalación deja entrar aire a las líneas, lo que libera los residuos acumulados. Esta alteración podría hacer que su separador de amalgama se llene antes de lo debido.

Un mes antes de instalar su NXT Hg5, Solmetex recomienda limpiar exhaustivamente sus líneas de aspiración con el limpiador de líneas de aspiradoras PowerScrub. Asegúrese de seguir las instrucciones para nuevos usuarios en las primeras dos limpiezas y luego seguir las instrucciones para limpiezas subsiguientes. Este procedimiento de un mes de duración debería ayudar a reducir la cantidad de residuos acumulados en sus líneas.

Las líneas de extracción limpias garantizan que las líneas de aspiración permanezcan seguras y en pleno funcionamiento. El mantenimiento adecuado solo requiere una pequeña fracción de tiempo del personal de odontología. Cuando se siguen los protocolos de limpieza adecuados y se usan los productos de limpieza correctos, las líneas de aspiración permanecerán libres de residuos acumulados, el flujo de aspiración no tendrá obstrucciones y los pacientes recibirán la mejor atención posible.

 Solmetex™ recomienda el limpiador de líneas de aspiradoras y el dispensador ayudante PowerScrub para toda la gama de separadores de amalgama Hg5.