

Séparateur air-eau Hg5

Instructions de recyclage et d'expédition

Instructions d'emballage du séparateur air-eau:

- Ouvrez et placez le sac de plastique dans le seau, retirez la tuyauterie en PVC blanche du séparateur air-eau et éliminez tout liquide.
- Placez les deux articles dans le sac de plastique doublant le seau de retour de 5 gallons.
- Remarque: aucun autre matériau ne doit être placé dans cet envoi. N'incluez aucun autre métal ni mercure liquide.
- Le contenant de collecte Hg5 doit être emballé séparément.
- Placez le seau d'amalgame dans la boîte d'expédition.

Remplir le formulaire de recyclage des déchets d'amalgame:

- Remplissez la Partie 1 du (Formulaire de profil pour le recyclage des déchets d'amalgame).
- Signez et datez le bas du formulaire.
- Placez le formulaire rempli dans la boîte de retour d'expédition.
- Notez le code d'expédition inscrit sur le couvercle du seau avant de passer à l'étape suivante.
- Utilisez l'attache torsadée fournie pour fermer le sac de plastique intérieur et placez-le dans le seau d'amalgame de 5 gallons.
- Placez le seau d'amalgame dans la boîte d'expédition.

Comment trouver votre code d'expédition:



Remarque: si aucun code d'expédition n'apparaît sur le couvercle, appelez au 800.216.5505 pour obtenir des renseignements sur le recyclage.

Procédure d'expédition:

- Repérez le (Code d'expédition) (voir ci-dessous) avant d'emballer le contenant.
- Visitez Solmetex.com et cliquez sur le bouton (Recycling Shipping Label) sur la page d'accueil, ce qui vous dirigera vers My Solutions Center.
- Connectez-vous à My Solutions Center avec votre adresse courriel et votre mot de passe.
- Sélectionnez le produit — (6 Gallon or (5 Gallon) disposal for Upper Chamber) selon la taille du seau utilisé.
- Entrez votre code d'expédition situé sur le couvercle du seau d'amalgame, puis sélectionnez (Submit).
- Un nouvel écran affichera votre étiquette. Remarque: vous devrez peut-être désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles.
- Imprimez l'étiquette, placez-la dans l'enveloppe pour bordereau d'expédition, retirez la pellicule protectrice de l'enveloppe et fixez-la sur la boîte pour le ramassage UPS, ou appelez au 1-800-742-5877 pour planifier un ramassage gratuit.



Une étiquette UPS par boîte d'expédition Solmetex. Les étiquettes ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

Certificat de recyclage:

- Visitez My Solutions Center pour récupérer votre certificat de recyclage. Veuillez noter: le traitement des certificats de recyclage peut prendre jusqu'à 30 jours à partir de la date d'expédition au recycleur.



**My
Solutions
Center™**



Formulaire de profil pour le recyclage des déchets d'amalgame



Dentistry's Complete
Provider of Water Solutions

30 Bearfoot Road

Northborough, MA 01532

Veuillez remplir les champs indiqués en vert. Dactylographiez ou écrivez à l'encre.

Date de réception:	
Nom / description du déchet : Amalgame dentaire utilisé	
Procédé générant le déchet: Amalgame dentaire utilisé provenant d'établissements dentaires	
Information sur le générateur	
Nom du cabinet ou du dentiste:	
Adresse d'expédition (rue, ville, état/province, code postal):	
Nom de la personne-ressource:	Adresse courriel:
Téléphone:	Télécopieur (si applicable):

Information DOT/EPA		
Nom d'expédition D.O.T.: Amalgame dentaire utilisé destiné au recyclage, DOT non réglementé (< 1 lb de mercure)		
Groupe d'emballage: Aucun	Classe de danger: Aucune	UN/NA: Aucun
Quantité à déclarer:	ERG#:	Codes de déchets E.P.A.: S/O (Si applicable)
Description physique du déchet: Amalgame dentaire désinfecté utilisé		

Composition chimique – Constituants: (Doit totaliser 100 %)	% total	TCLP (MG/L)	TCLP (MG/L)
Mercure (< 1 lb)	Jusqu'à 50 %		
Argent, zinc, autres métaux	Jusqu'à 50 %		
Solution javellissante	Jusqu'à 50 %		

Certification

Je certifie par la présente que j'ai personnellement examiné et que je connais bien les renseignements soumis dans ce document et tous les documents joints.

Signature

Nom/Titre en lettres moulées

Date

Mercury Recyclers International
PO Box 62686
Palm Bay, FL 32906
1-888-626-0694

APPROBATION #

(Usage réservé à MRI)