

Désinstallation du système séparateur d'amalgame Hg5 (legacy)

D'ABORD, COMMENT ÉVALUER SI VOUS POUVEZ LE FAIRE VOUS-MÊME (BRICOLAGE)

Au fil de milliers d'installations de systèmes réalisées au cours de plusieurs décennies, nous avons observé de nombreuses méthodes différentes utilisées pour installer les systèmes séparateurs d'amalgame NXT Hg5 et Hg5. Les méthodes d'installation varient selon l'emplacement de l'équipement, la proximité d'autres appareils ou simplement les préférences de l'installateur. En raison de cette variabilité, les changements peuvent aller de très simples à assez complexes, et toutes les configurations ne se prêtent pas à un changement fait soi-même.

Pour évaluer la facilité ou la complexité de votre installation particulière, **veuillez communiquer avec notre équipe technique afin de discuter de votre système AVANT de commencer.** Elle peut vous conseiller ou effectuer une évaluation à distance de votre installation, en vous fournissant des instructions claires, des trucs et astuces pour surmonter les difficultés mineures, ou en vous indiquant quand il est nécessaire de faire appel à un professionnel. Nous voulons que votre cabinet continue de fonctionner sans problème et réduire au minimum les temps d'arrêt.

Rassembler les outils et les fournitures

- ✓ **7/16 po ou clé à molette**
- ✓ **Tournevis à tête plate** pour retirer la quincaillerie fixée à la plaque arrière sur le mur.
- ✓ **Scie à main ou coupe-tube** pour retirer une partie du tuyau afin que le système entre dans le seau de recyclage.
- ✓ **Équipement de protection individuelle (EPI) adéquat** : suivez toujours le protocole de votre bureau en matière de protection personnelle lors de la manipulation de matières biodangereuses (gants, protection oculaire ou faciale et sarrau).
- ✓ **Grand seau de recyclage fourni par Solmetex pour l'expédition sécuritaire de votre ancien système** (inclus avec la mise à niveau) : le seau de recyclage de déchets d'amalgame de 6 (ou 5) gallons sert aux composants du système, mais non au récipient de collecte. Solmetex WCP-6G (ou WCP-5G).
- ✓ **Trousse de recyclage du récipient de collecte** (incluse avec la mise à niveau) : pour l'expédition sécuritaire du récipient de collecte usagé au recycleur. **Remarque** : Un récipient de collecte Hg5® usagé **nécessite** la trousse de recyclage Hg5®. Consultez le contenu d'une trousse de recyclage Hg5 dans ce guide.


Remarque : Les pièces des trousse de recyclage Hg5 et NXT Hg5 ne sont pas interchangeables.



Tournevis à tête plate





Clé à molette

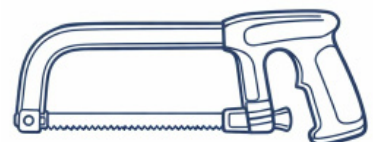


Scie à main / scie à tuyau

Composants du système

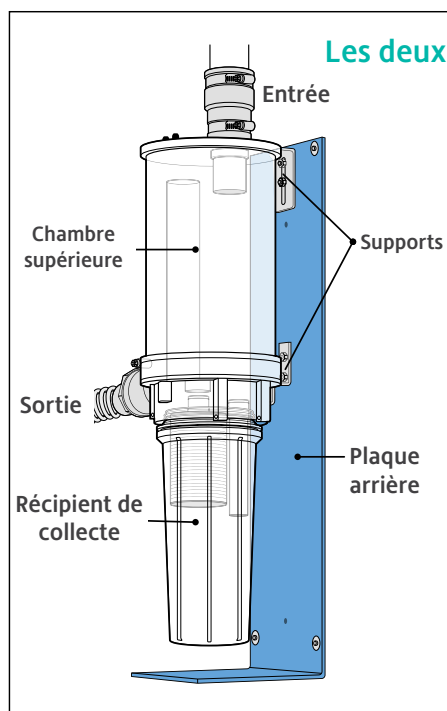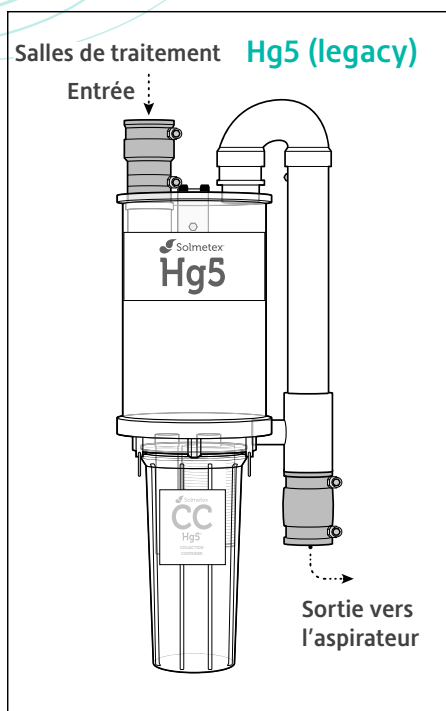

Contenu de la trousse de recyclage pour le récipient de collecte Hg5

- Une (1) fiche d'instructions de la procédure de remplacement et de recyclage
- Un (1) bouchon de recyclage avec code d'expédition unique
- Un (1) sac de recyclage en plastique
- Une (1) boîte d'expédition recyclée
- Trois (3) longueurs de ruban d'emballage: 15 po (x1) et 6 po (x2)
- Une (1) pochette adhésive transparente pour l'étiquette d'expédition de retour
- Deux (2) embouts d'emballage

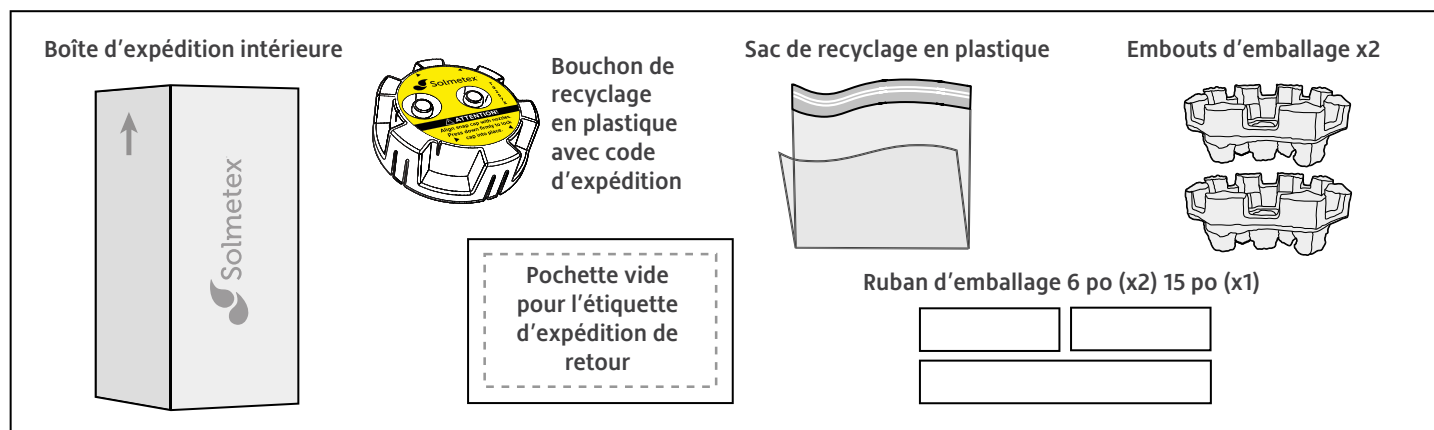

Si des pièces sont manquantes ou si vous souhaitez confirmer que vous avez tout ce qu'il faut,


→ communiquez avec le service à la clientèle au 1 800 216-5505 ou → par clavardage sur Solmetex.com.

Désinstaller votre système : Hg5 (legacy)

Le retrait et le recyclage d'un système comportent plusieurs étapes.



Avant de commencer :

- Inspecter** la **chambre supérieure** du système pour s'assurer qu'elle ne contient aucun déchet liquide. Si des déchets liquides sont présents, communiquer avec Solmetex pour obtenir d'autres instructions. Si aucun déchet liquide n'est présent dans la **chambre supérieure**, procéder au retrait du récipient de collecte.
- Préparer** le seau de recyclage en le tapissant du sac en plastique fourni et le garder à proximité.
- Rassembler** à proximité les pièces de la trousse de recyclage du récipient de collecte usagé : bouchon de recyclage. **Remarque : Les pièces des trousse de recyclage Hg5 et NXT Hg5 ne sont pas interchangeables. Vous aurez besoin de la trousse de recyclage Hg5 (legacy) pour le récipient Hg5 « usagé ».**

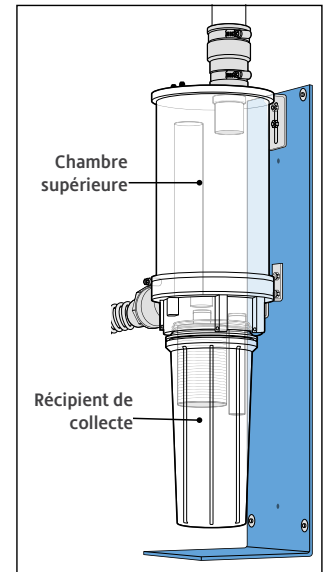


Retirer le récipient de collecte usagé :

- Pendant que le système de vide fonctionne toujours**, retirer le **récipient de collecte** usagé du système comme suit : Si le **récipient de collecte** est complètement plein jusqu'au sommet, placer le seau tapissé sous l'assemblage avant le retrait.
 - Soutenir le **récipient de collecte** d'une main, tout en retirant les goupilles de retenue de l'autre main.
 - Incliner le **récipient de collecte** sur le côté pour libérer le vide, puis tirer vers le bas pour le retirer.
- Sceller le récipient de collecte** à l'aide du bouchon de recyclage en plastique fourni dans la trousse de recyclage.
 - Installer le bouchon de recyclage en plastique (portant le code d'expédition).
 - Pour le Hg5 :** Placer le bouchon de recyclage Hg5 sur le récipient de collecte Hg5. Aligner le bouchon à pression avec les embouts et appuyer fermement pour le verrouiller en place. Une fois scellé, mettre de côté.



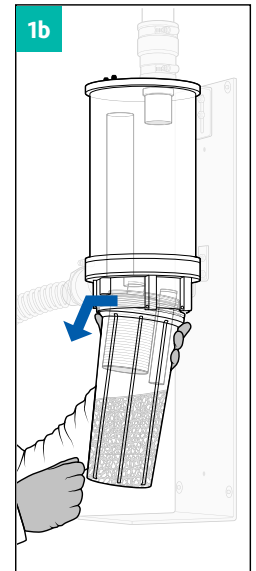
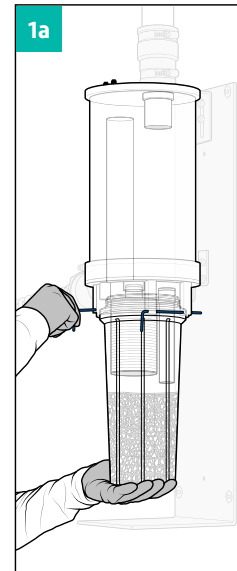


Noter le code d'expédition à usage unique figurant sur l'étiquette jaune au-dessus du bouchon du récipient de collecte.

Nous recommandons de l'inscrire sur l'extérieur de la boîte d'expédition.

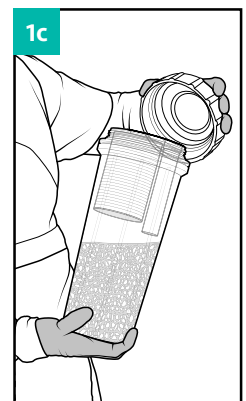

Désinstallation de la chambre supérieure

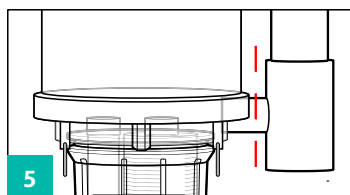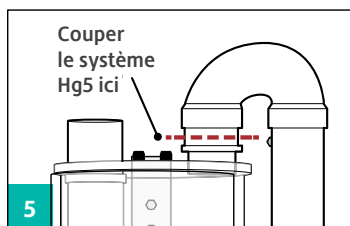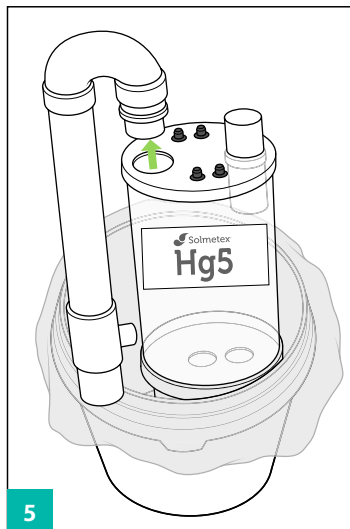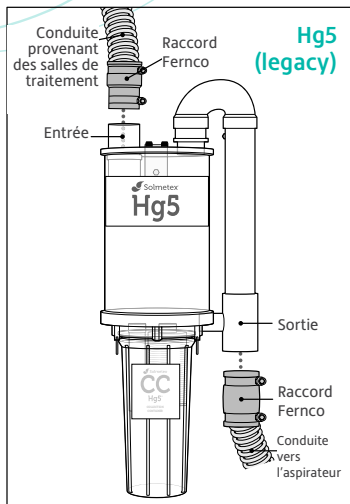

Questions sur le recyclage :

Appelez le soutien au
1 800 216-5505

1. Maintenant que le récipient de collecte est retiré, **éteindre le système de vide.**

2. Détacher l'aspirateur des orifices d'**entrée** et de **sortie** de la chambre supérieure. Il peut être nécessaire de desserrer d'abord les colliers des raccords Fernco en caoutchouc à l'aide d'un tournevis.

Pour les mises à niveau ou les réinstallations, laisser les raccords en caoutchouc fixés aux conduites d'entrée et de sortie de l'aspirateur. Ils seront réutilisés sur le nouveau système.

3. Desserrer les deux écrous du support supérieur à l'aide d'une clé à molette ou de 7/16 po.




4. Soulever le support supérieur desserré par-dessus les languettes en caoutchouc pour libérer la chambre supérieure, puis tirer le système vers l'avant pour retirer la chambre supérieure de la plaque arrière bleue.

Remarque : La plaque arrière bleue existante peut être réutilisée pour le nouveau système. De la nouvelle quincaillerie (supports et fixations) est incluse avec le système de remplacement.

5. Déposer la chambre supérieure dans le seau pour le recyclage.

- Le système Hg5 n'entrera pas dans le seau tant que le collecteur en plastique sur le côté n'aura pas été retiré. Pour ce faire, à l'aide de la scie à main, couper le plus près possible du point où la pièce en plastique PVC blanc rejoint le dessus en plastique transparent de la chambre supérieure.

Couper ou briser les raccords latéraux et séparer complètement le collecteur de la chambre supérieure. Mettre le système et la pièce de collecteur retirée dans le seau de recyclage.

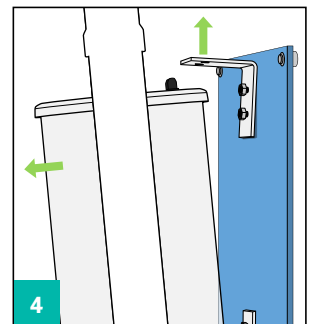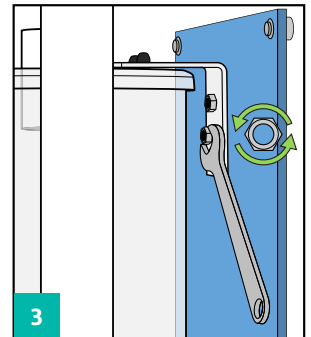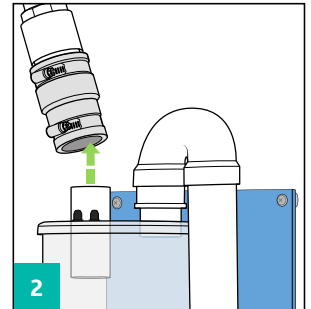

Étape suivante : Recyclage

Terminer l'emballage du Hg5 pour l'expédition au recycleur avant d'installer le nouveau système NXT Hg5.

Remarque : La chambre supérieure usagée sera emballée et expédiée séparément pour le recyclage. Elle n'est pas expédiée avec le récipient de collecte usagé.



Chambre supérieure Hg5®
usagée dans le seau



Récipient de collecte Hg5®
usagé dans la boîte