

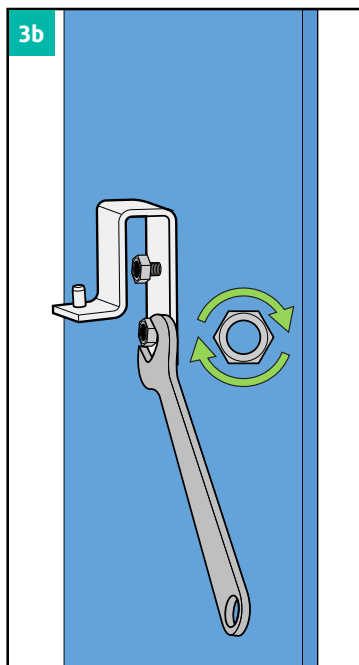
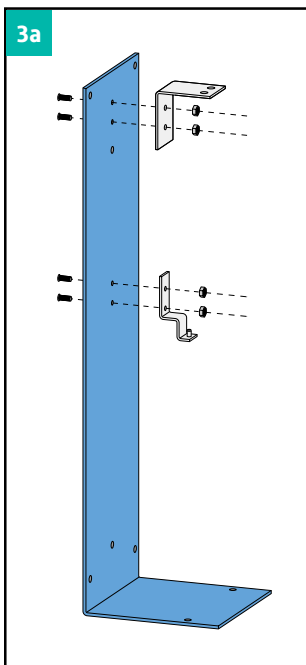


Installation du nouveau système NXT Hg5 sur la plaque arrière existante

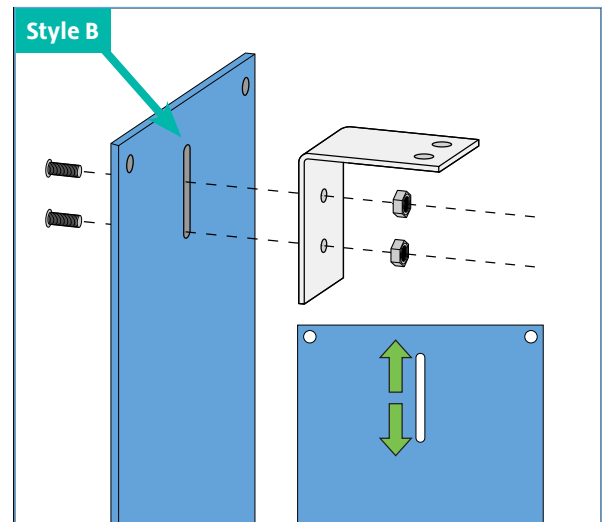


Remplacement de la quincaillerie de montage

1. Retirer les anciens supports et la quincaillerie de la plaque arrière.
2. Retirer la plaque arrière du mur, si elle y est fixée, pour accéder à l'arrière. Installer la nouvelle quincaillerie et les nouveaux supports (fournis) sur la plaque arrière.
3. Votre plaque arrière bleue existante correspond à l'un des deux styles suivants:
 - **Style A** Si votre plaque arrière comporte deux trous pour le support supérieur, les nouveaux supports devraient s'aligner. Si les trous de vis ne s'alignent pas avec le nouveau support supérieur, communiquer avec le soutien technique par clavardage sur Solmetex.com ou au **800 216-5505**.
 - **Style B** Si votre plaque arrière comporte une longue fente, il suffit d'ajuster la position de la vis pour installer le nouveau support.

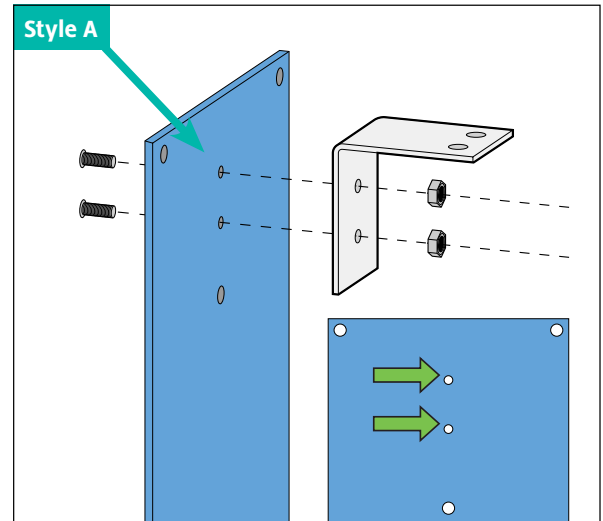


- a. Installer 4 inserts filetés à l'arrière de la plaque arrière et les fixer à l'aide de 4 écrous hexagonaux à l'avant de la plaque arrière.
 - b. Installer d'abord le support inférieur, en serrant l'écrou hexagonal jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
 - c. Installer le support supérieur, en laissant les écrous serrés, mais légèrement desserrés pour permettre un ajustement lors de l'installation de la chambre supérieure.
4. Refixer la plaque arrière bleue avec la nouvelle quincaillerie au mur (si elle est montée au mur).


Composants du système

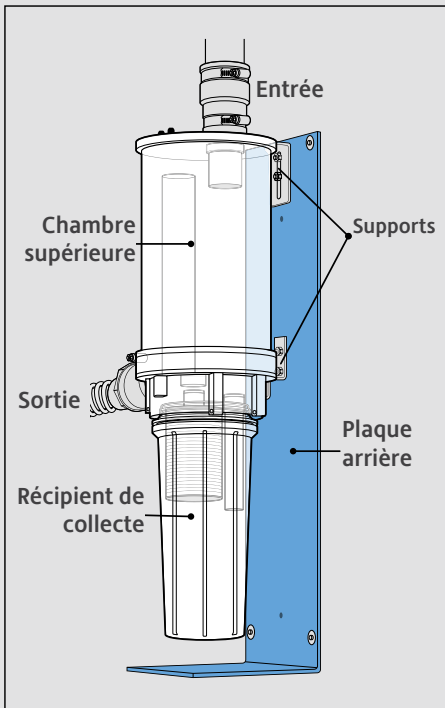


Salles de traitement NXT Hg5

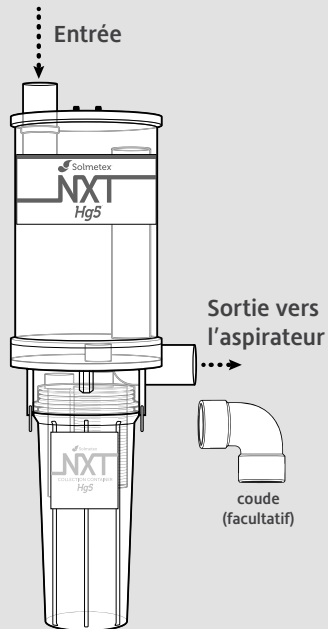

2-3

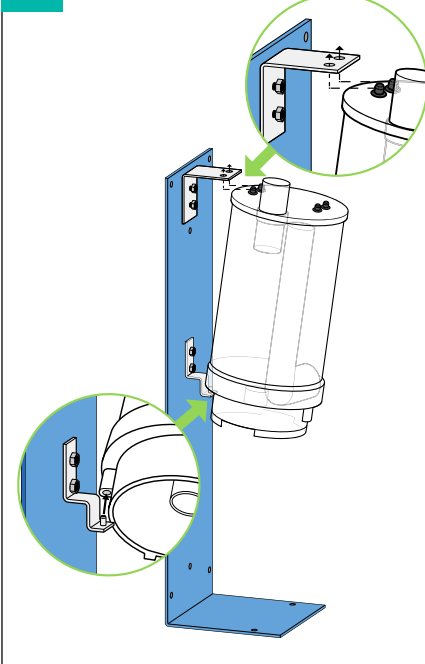



4

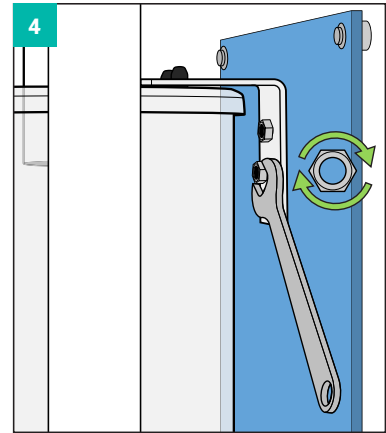

Installer la chambre supérieure



1. Confirmer si le système sera orienté vers la gauche ou vers la droite selon la position des tuyaux d'entrée et de sortie du système précédent.
2. Positionner et monter la nouvelle chambre supérieure sur la broche du support inférieur. Faire pivoter l'assemblage en place en gardant la fente engagée sur la broche.
3. Aligner et insérer les trous du support supérieur avec les embouts en caoutchouc sur le dessus de la chambre supérieure, puis pousser le support vers le bas par-dessus les languettes jusqu'à ce que l'unité soit bien fixée en place.
4. Une fois la chambre supérieure bien en place, serrer les deux écrous du support supérieur.
5. Rebrancher l'aspirateur (**mais ne pas le redémarrer**)
Rebrancher les tuyaux des conduites d'entrée et de sortie de l'aspirateur à l'aide des raccords Fernco en caoutchouc. Un coude est inclus, au besoin. Ne pas coller la tuyauterie à l'entrée ou à la sortie du NXT Hg5, sauf le coude, s'il est utilisé.
6. Soutenir tous les tuyaux et conduites de l'aspirateur raccordés afin d'éviter toute contrainte sur les raccordements d'entrée et de sortie.

5

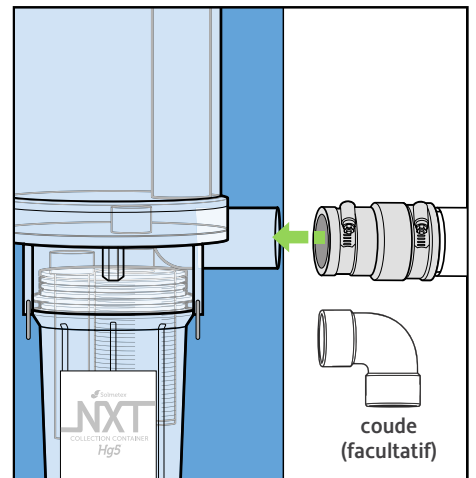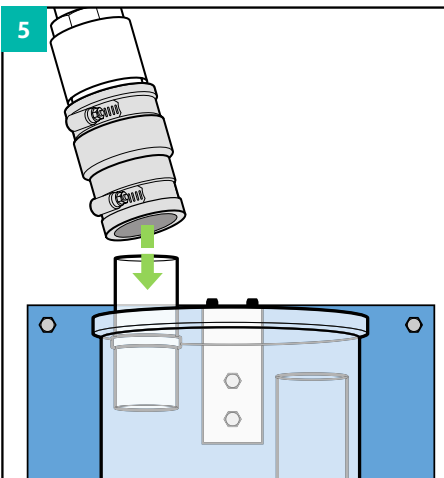

Installer le récipient de collecte

1. Repérer le nouveau récipient de collecte **NXT Hg5**
2. Installer votre nouveau récipient de collecte comme suit:
 - a. Le récipient de collecte ne peut être installé que d'une seule façon. Noter l'alignement des raccords sur le récipient de collecte avec les trous récepteurs de la chambre supérieure.
 - b. Aligner le récipient de collecte de manière à ce que le raccord à embout le plus long soit dans l'axe et du même côté que l'orifice de sortie de la chambre supérieure.
 - c. Insérer délicatement les raccords du récipient de collecte dans les trous récepteurs de la chambre supérieure.
 - d. Continuer à pousser le récipient de collecte dans la chambre supérieure jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.

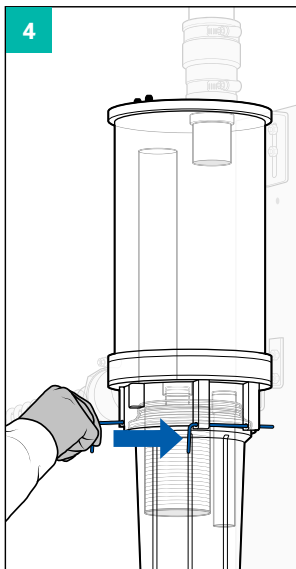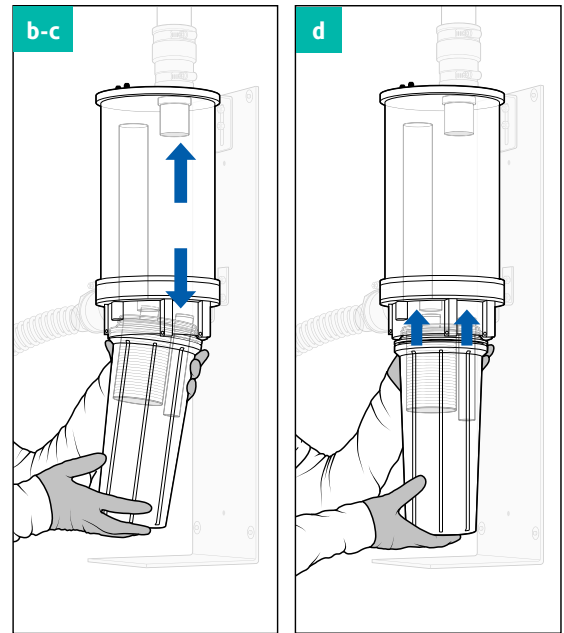

3. Insérer les deux (2) goupilles de retenue dans leurs trous de chaque côté du récipient de collecte jusqu'à ce qu'elles soient en place. Le récipient de collecte est maintenant verrouillé en place.
4. Remplir les renseignements sur l'étiquette:
 - Inscrire la « date d'installation » sur le nouveau récipient de collecte.
 - Inscrire la « prochaine date de rechange » sur le nouveau récipient de collecte. Choisir une date correspondant à votre fréquence de remplacement habituelle, sans dépasser 12 mois.
 - Programmer un rappel au calendrier pour inspecter le récipient de collecte.

5. Redémarrer l'aspirateur

Et voilà, c'est terminé!



**Assurez-vous
d'expédier les colis
immédiatement.**

**Questions
sur le recyclage :**
Appelez le soutien
au **1 800 216-5505**



Emballage et expédition au recycleur

Si ce n'est pas déjà fait, emballer les pièces de l'ancien système pour l'expédition au recycleur :



Chambre supérieure Hg5®
usagée dans le seau



Récipient de collecte Hg5®
usagé dans la boîte