


Passer d'un Hg5® (legacy) à un séparateur d'amalgame NXT Hg5®

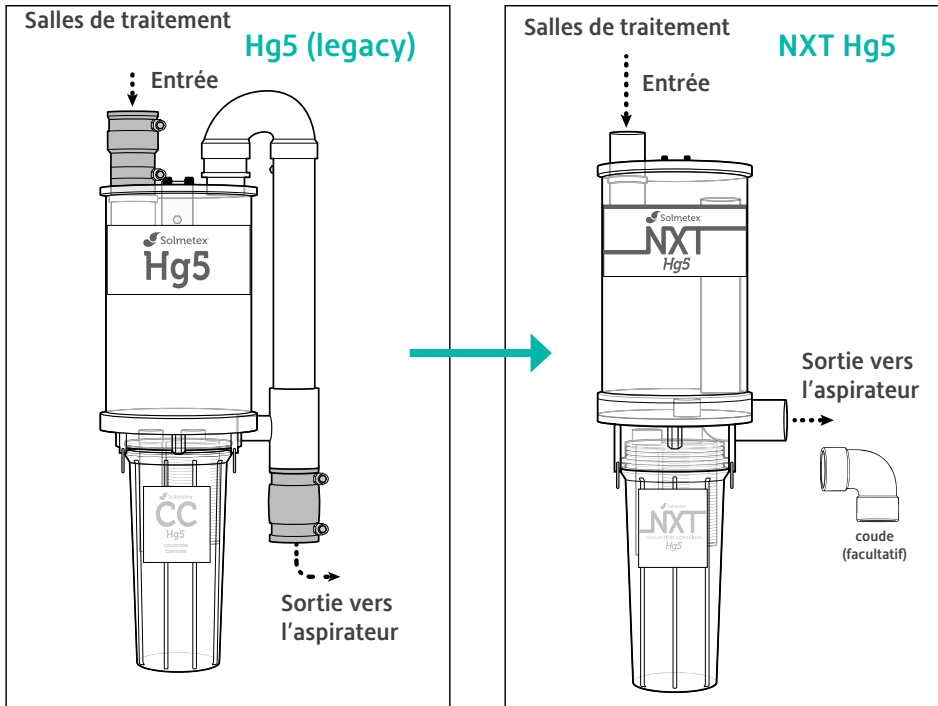

Composants du système



D'ABORD, ÉVALUER SI VOUS POUVEZ LE FAIRE VOUS-MÊME (BRICOLAGE)

Aucune installation n'est identique à une autre. Selon la façon dont votre système NXT Hg5 ou Hg5 a été installé, un changement peut être simple ou complexe. Avant de commencer, prendre quelques photos de votre système, puis communiquer avec notre équipe technique pour une évaluation rapide. Elle vous expliquera à quoi vous attendre, vous donnera des trucs utiles ou vous indiquera si l'intervention d'un professionnel est préférable.

Pour une évaluation rapide par notre équipe technique:

→ communiquez avec le service à la clientèle au 1 800 216-5505 ou → par clavardage sur Solmetex.com.

Accédez aux guides ci-dessous pour connaître les étapes clés:

Désinstallation Système Hg5® (legacy)



Recyclage Pièces Hg5® (legacy)



Chambre supérieure Hg5®
usagée dans le seau



Récipient de collecte Hg5®
usagé dans la boîte

Installation Nouveau système NXT Hg5®



Désinstallation du système séparateur d'amalgame Hg5 (legacy)

D'ABORD, COMMENT ÉVALUER SI VOUS POUVEZ LE FAIRE VOUS-MÊME (BRICOLAGE)

Au fil de milliers d'installations de systèmes réalisées au cours de plusieurs décennies, nous avons observé de nombreuses méthodes différentes utilisées pour installer les systèmes séparateurs d'amalgame NXT Hg5 et Hg5. Les méthodes d'installation varient selon l'emplacement de l'équipement, la proximité d'autres appareils ou simplement les préférences de l'installateur. En raison de cette variabilité, les changements peuvent aller de très simples à assez complexes, et toutes les configurations ne se prêtent pas à un changement fait soi-même.

Pour évaluer la facilité ou la complexité de votre installation particulière, **veuillez communiquer avec notre équipe technique afin de discuter de votre système AVANT de commencer.** Elle peut vous conseiller ou effectuer une évaluation à distance de votre installation, en vous fournissant des instructions claires, des trucs et astuces pour surmonter les difficultés mineures, ou en vous indiquant quand il est nécessaire de faire appel à un professionnel. Nous voulons que votre cabinet continue de fonctionner sans problème et réduire au minimum les temps d'arrêt.

Rassembler les outils et les fournitures

- ✓ **7/16 po ou clé à molette**
- ✓ **Tournevis à tête plate** pour retirer la quincaillerie fixée à la plaque arrière sur le mur.
- ✓ **Scie à main ou coupe-tube** pour retirer une partie du tuyau afin que le système entre dans le seau de recyclage.
- ✓ **Équipement de protection individuelle (EPI) adéquat** : suivez toujours le protocole de votre bureau en matière de protection personnelle lors de la manipulation de matières biodangereuses (gants, protection oculaire ou faciale et sarrau).
- ✓ **Grand seau de recyclage fourni par Solmetex pour l'expédition sécuritaire de votre ancien système** (inclus avec la mise à niveau) : le seau de recyclage de déchets d'amalgame de 6 (ou 5) gallons sert aux composants du système, mais non au récipient de collecte. Solmetex WCP-6G (ou WCP-5G).
- ✓ **Trousse de recyclage du récipient de collecte** (incluse avec la mise à niveau) : pour l'expédition sécuritaire du récipient de collecte usagé au recycleur. **Remarque** : Un récipient de collecte Hg5[®] usagé **nécessite** la trousse de recyclage Hg5[®]. Consultez le contenu d'une trousse de recyclage Hg5 dans ce guide.


Remarque : Les pièces des trousse de recyclage Hg5 et NXT Hg5 ne sont pas interchangeables.



Tournevis à tête plate





Clé à molette

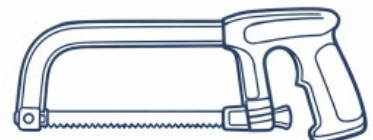


Scie à main / scie à tuyau

Composants du système

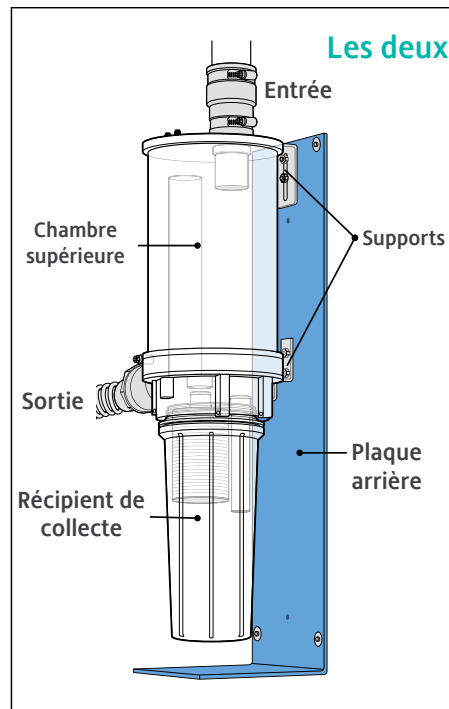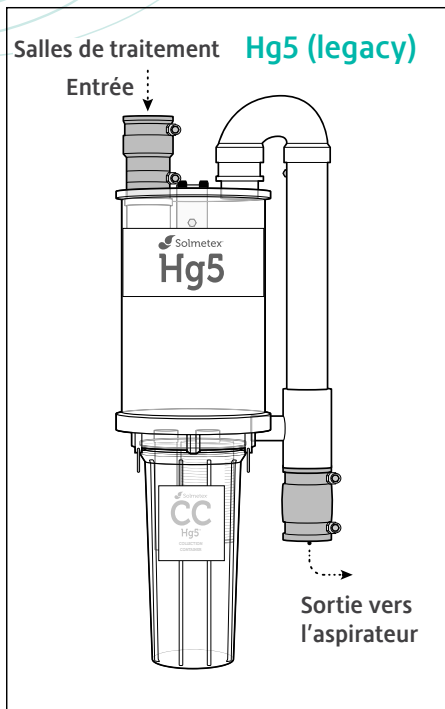

Contenu de la trousse de recyclage pour le récipient de collecte Hg5

- Une (1) fiche d'instructions de la procédure de remplacement et de recyclage
- Un (1) bouchon de recyclage avec code d'expédition unique
- Un (1) sac de recyclage en plastique
- Une (1) boîte d'expédition recyclée
- Trois (3) longueurs de ruban d'emballage: 15 po (x1) et 6 po (x2)
- Une (1) pochette adhésive transparente pour l'étiquette d'expédition de retour
- Deux (2) embouts d'emballage

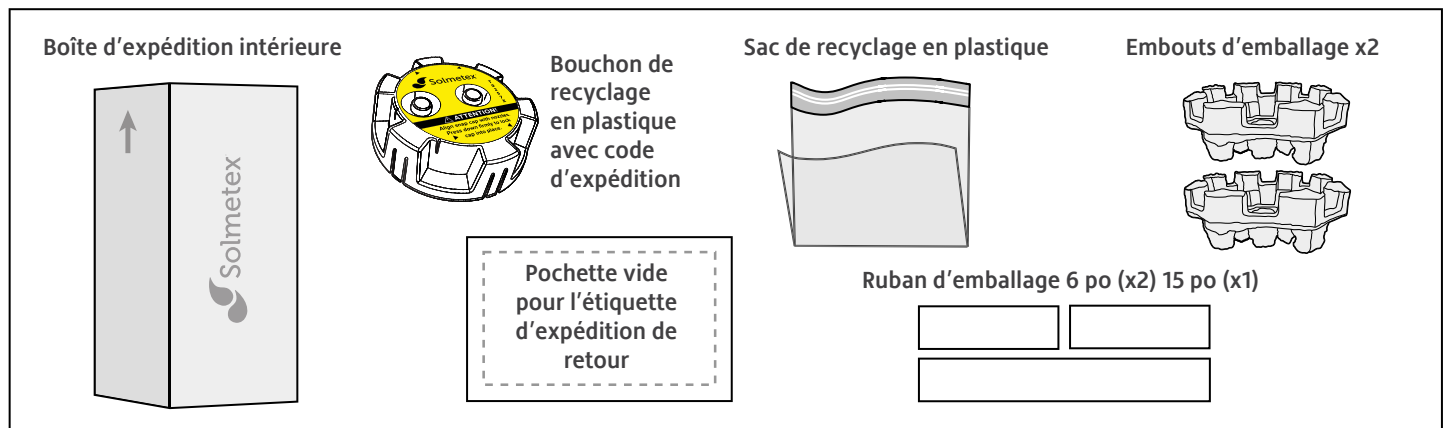

Si des pièces sont manquantes ou si vous souhaitez confirmer que vous avez tout ce qu'il faut,


→ communiquez avec le service à la clientèle au 1 800 216-5505 ou → par clavardage sur Solmetex.com.

Désinstaller votre système : Hg5 (legacy)

Le retrait et le recyclage d'un système comportent plusieurs étapes.

Avant de commencer :



- Inspecter** la **chambre supérieure** du système pour s'assurer qu'elle ne contient aucun déchet liquide. Si des déchets liquides sont présents, communiquer avec Solmetex pour obtenir d'autres instructions. Si aucun déchet liquide n'est présent dans la **chambre supérieure**, procéder au retrait du récipient de collecte.
- Préparer** le seau de recyclage en le tapissant du sac en plastique fourni et le garder à proximité.
- Rassembler** à proximité les pièces de la trousse de recyclage du récipient de collecte usagé : bouchon de recyclage. **Remarque : Les pièces des trousse de recyclage Hg5 et NXT Hg5 ne sont pas interchangeables. Vous aurez besoin de la trousse de recyclage Hg5 (legacy) pour le récipient Hg5 « usagé ».**

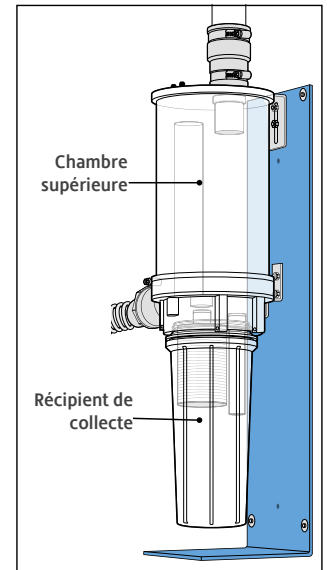

Retirer le récipient de collecte usagé :


- Pendant que le système de vide fonctionne toujours**, retirer le **récipient de collecte** usagé du système comme suit : Si le **récipient de collecte** est complètement plein jusqu'au sommet, placer le seau tapissé sous l'assemblage avant le retrait.
 - Soutenir le **récipient de collecte** d'une main, tout en retirant les goupilles de retenue de l'autre main.
 - Incliner le **récipient de collecte** sur le côté pour libérer le vide, puis tirer vers le bas pour le retirer.
- Sceller le récipient de collecte** à l'aide du bouchon de recyclage en plastique fourni dans la trousse de recyclage.
 - Installer le bouchon de recyclage en plastique (portant le code d'expédition).

Pour le Hg5 : Placer le bouchon de recyclage Hg5 sur le récipient de collecte Hg5. Aligner le bouchon à pression avec les embouts et appuyer fermement pour le verrouiller en place. Une fois scellé, mettre de côté.



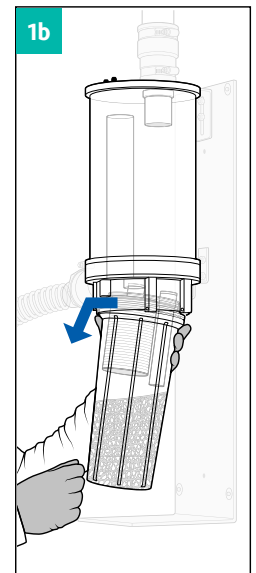
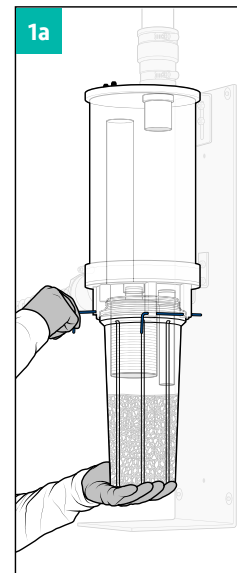


Noter le code d'expédition à usage unique figurant sur l'étiquette jaune au-dessus du bouchon du récipient de collecte.

Nous recommandons de l'inscrire sur l'extérieur de la boîte d'expédition.

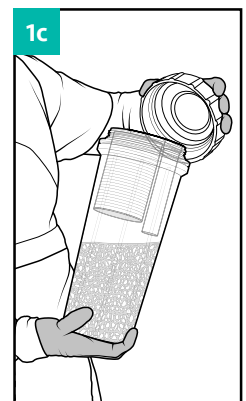

Désinstallation de la chambre supérieure

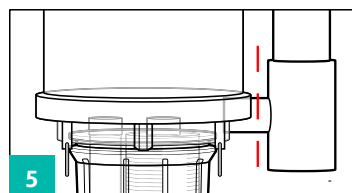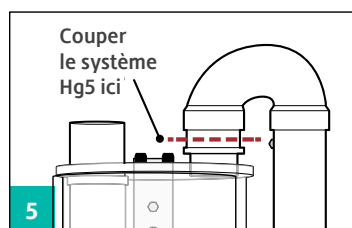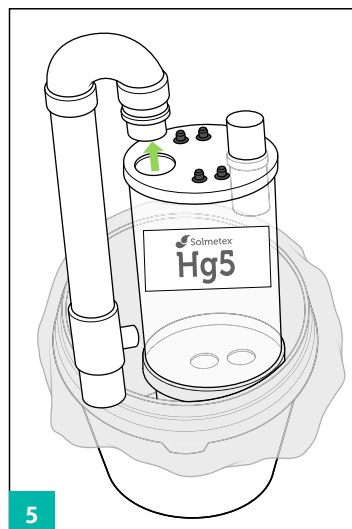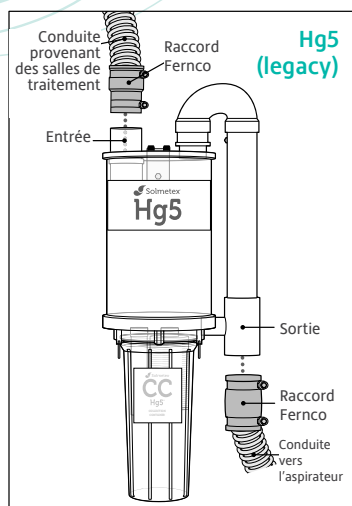

Questions sur le recyclage :

Appelez le soutien au
1 800 216-5505

1. Maintenant que le récipient de collecte est retiré, **éteindre le système de vide.**

2. Détacher l'aspirateur des orifices d'**entrée** et de **sortie** de la chambre supérieure. Il peut être nécessaire de desserrer d'abord les colliers des raccords Fernco en caoutchouc à l'aide d'un tournevis.

Pour les mises à niveau ou les réinstallations, laisser les raccords en caoutchouc fixés aux conduites d'entrée et de sortie de l'aspirateur. Ils seront réutilisés sur le nouveau système.

3. Desserrer les deux écrous du support supérieur à l'aide d'une clé à molette ou de 7/16 po.




4. Soulever le support supérieur desserré par-dessus les languettes en caoutchouc pour libérer la chambre supérieure, puis tirer le système vers l'avant pour retirer la chambre supérieure de la plaque arrière bleue.

Remarque : La plaque arrière bleue existante peut être réutilisée pour le nouveau système. De la nouvelle quincaillerie (supports et fixations) est incluse avec le système de remplacement.

5. Déposer la chambre supérieure dans le seau pour le recyclage.

- Le système Hg5 n'entrera pas dans le seau tant que le collecteur en plastique sur le côté n'aura pas été retiré. Pour ce faire, à l'aide de la scie à main, couper le plus près possible du point où la pièce en plastique PVC blanc rejoint le dessus en plastique transparent de la chambre supérieure.

Couper ou briser les raccords latéraux et séparer complètement le collecteur de la chambre supérieure. Mettre le système et la pièce de collecteur retirée dans le seau de recyclage.

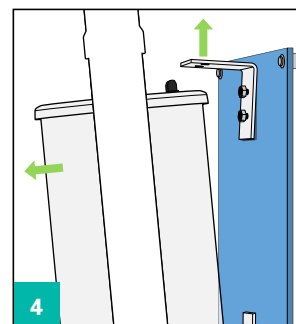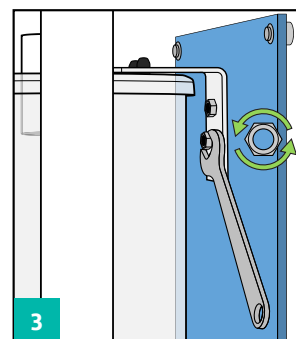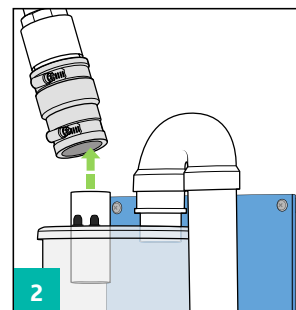

Étape suivante : Recyclage

Terminer l'emballage du Hg5 pour l'expédition au recycleur avant d'installer le nouveau système NXT Hg5.

Remarque : La chambre supérieure usagée sera emballée et expédiée séparément pour le recyclage. Elle n'est pas expédiée avec le récipient de collecte usagé.



Chambre supérieure Hg5®
usagée dans le seau







Récipient de collecte Hg5®
usagé dans la boîte

Installation du nouveau système NXT Hg5 sur la plaque arrière existante




Remplacement de la quincaillerie de montage

1. Retirer les anciens supports et la quincaillerie de la plaque arrière.
2. Retirer la plaque arrière du mur, si elle y est fixée, pour accéder à l'arrière. Installer la nouvelle quincaillerie et les nouveaux supports (fournis) sur la plaque arrière.
3. Votre plaque arrière bleue existante correspond à l'un des deux styles suivants:
 - **Style A** Si votre plaque arrière comporte deux trous pour le support supérieur, les nouveaux supports devraient s'aligner. Si les trous de vis ne s'alignent pas avec le nouveau support supérieur, communiquer avec le soutien technique par clavardage sur Solmetex.com ou au **800 216-5505**.
 - **Style B** Si votre plaque arrière comporte une longue fente, il suffit d'ajuster la position de la vis pour installer le nouveau support.

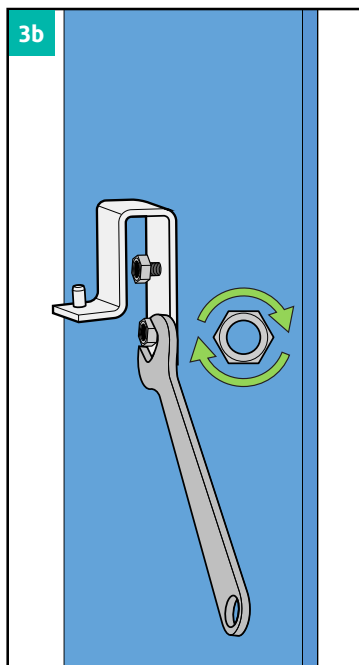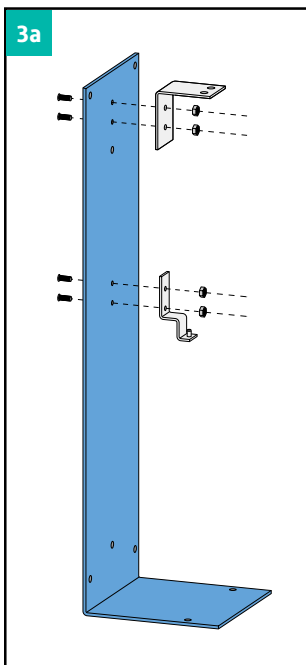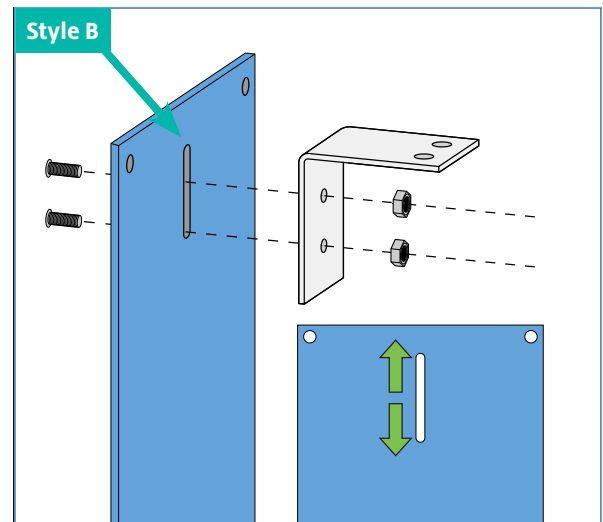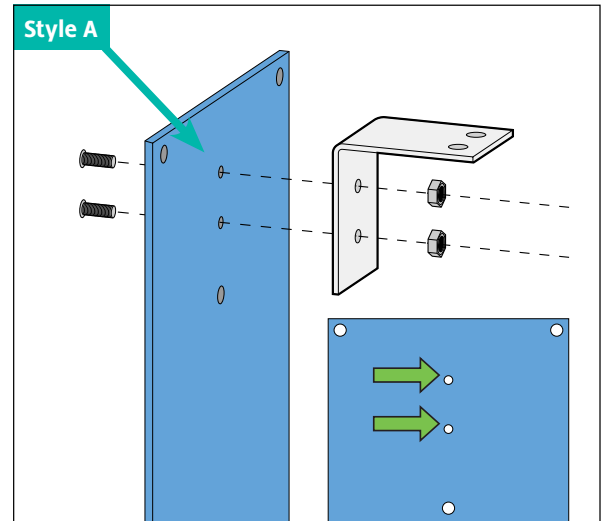


- a. Installer 4 inserts filetés à l'arrière de la plaque arrière et les fixer à l'aide de 4 écrous hexagonaux à l'avant de la plaque arrière.
 - b. Installer d'abord le support inférieur, en serrant l'écrou hexagonal jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
 - c. Installer le support supérieur, en laissant les écrous serrés, mais légèrement desserrés pour permettre un ajustement lors de l'installation de la chambre supérieure.
4. Refixer la plaque arrière bleue avec la nouvelle quincaillerie au mur (si elle est montée au mur).


Composants du système

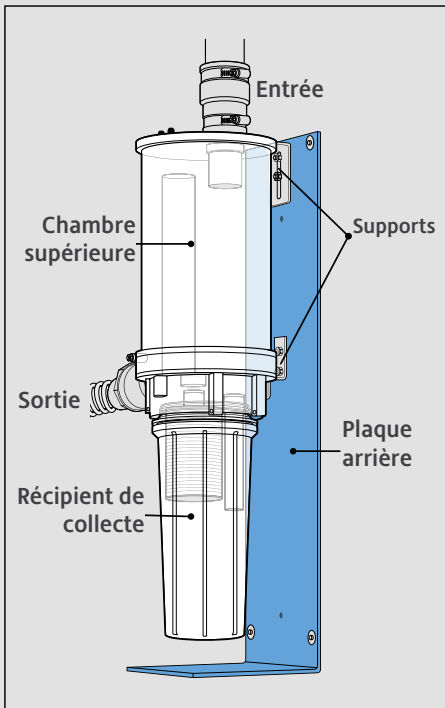


Salles de traitement NXT Hg5

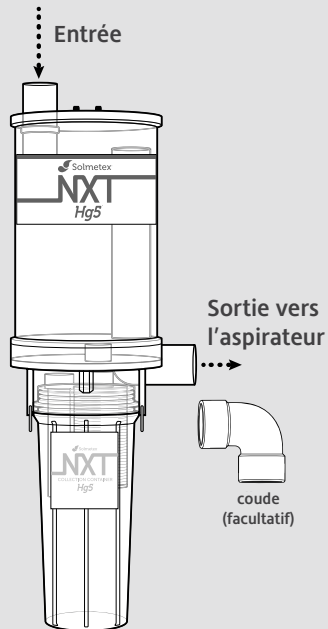

2-3

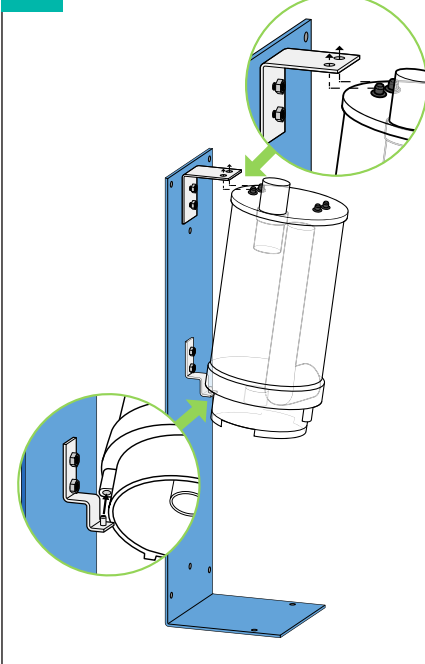



4

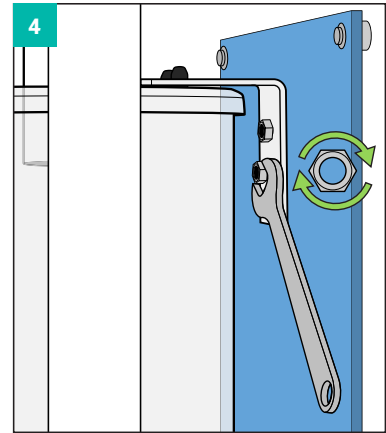

Installer la chambre supérieure



1. Confirmer si le système sera orienté vers la gauche ou vers la droite selon la position des tuyaux d'entrée et de sortie du système précédent.
2. Positionner et monter la nouvelle chambre supérieure sur la broche du support inférieur. Faire pivoter l'assemblage en place en gardant la fente engagée sur la broche.
3. Aligner et insérer les trous du support supérieur avec les embouts en caoutchouc sur le dessus de la chambre supérieure, puis pousser le support vers le bas par-dessus les languettes jusqu'à ce que l'unité soit bien fixée en place.
4. Une fois la chambre supérieure bien en place, serrer les deux écrous du support supérieur.
5. Rebrancher l'aspirateur (**mais ne pas le redémarrer**)
Rebrancher les tuyaux des conduites d'entrée et de sortie de l'aspirateur à l'aide des raccords Fernco en caoutchouc. Un coude est inclus, au besoin. Ne pas coller la tuyauterie à l'entrée ou à la sortie du NXT Hg5, sauf le coude, s'il est utilisé.
6. Soutenir tous les tuyaux et conduites de l'aspirateur raccordés afin d'éviter toute contrainte sur les raccordements d'entrée et de sortie.

5

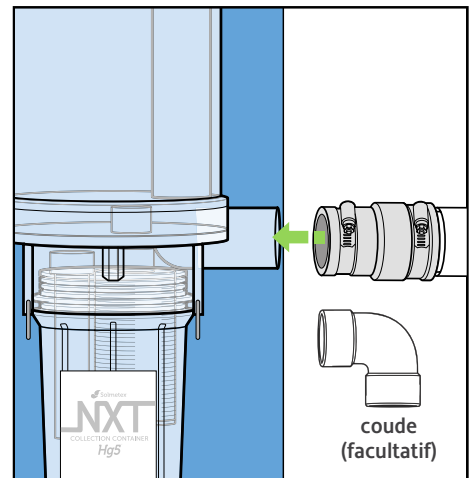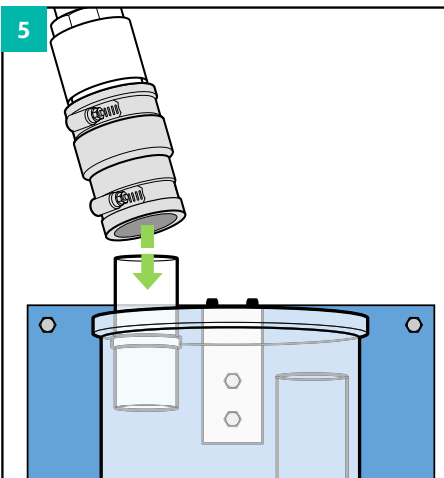

Installer le récipient de collecte

1. Repérer le nouveau récipient de collecte **NXT Hg5**
2. Installer votre nouveau récipient de collecte comme suit:
 - a. Le récipient de collecte ne peut être installé que d'une seule façon. Noter l'alignement des raccords sur le récipient de collecte avec les trous récepteurs de la chambre supérieure.
 - b. Aligner le récipient de collecte de manière à ce que le raccord à embout le plus long soit dans l'axe et du même côté que l'orifice de sortie de la chambre supérieure.
 - c. Insérer délicatement les raccords du récipient de collecte dans les trous récepteurs de la chambre supérieure.
 - d. Continuer à pousser le récipient de collecte dans la chambre supérieure jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.

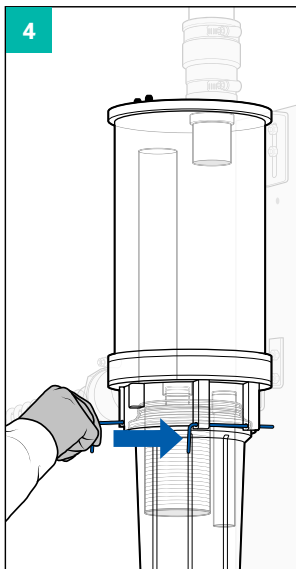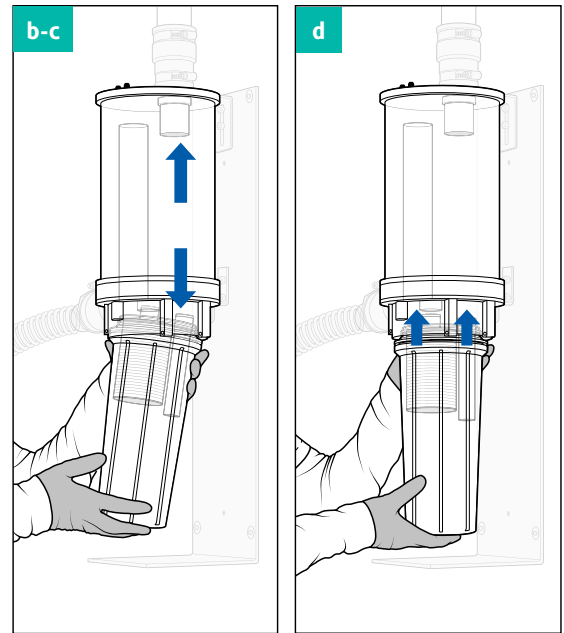

3. Insérer les deux (2) goupilles de retenue dans leurs trous de chaque côté du récipient de collecte jusqu'à ce qu'elles soient en place. Le récipient de collecte est maintenant verrouillé en place.
4. Remplir les renseignements sur l'étiquette:
 - Inscrire la « date d'installation » sur le nouveau récipient de collecte.
 - Inscrire la « prochaine date de rechange » sur le nouveau récipient de collecte. Choisir une date correspondant à votre fréquence de remplacement habituelle, sans dépasser 12 mois.
 - Programmer un rappel au calendrier pour inspecter le récipient de collecte.

5. Redémarrer l'aspirateur

Et voilà, c'est terminé!



**Assurez-vous
d'expédier les colis
immédiatement.**

**Questions
sur le recyclage :**
Appelez le soutien
au **1 800 216-5505**



Emballage et expédition au recycleur

Si ce n'est pas déjà fait, emballer les pièces de l'ancien système pour l'expédition au recycleur :



Chambre supérieure Hg5®
usagée dans le seau



Récipient de collecte Hg5®
usagé dans la boîte

Séparateur air-eau Hg5

Instructions de recyclage et d'expédition

Instructions d'emballage du séparateur air-eau:

- Ouvrez et placez le sac de plastique dans le seau, retirez la tuyauterie en PVC blanche du séparateur air-eau et éliminez tout liquide.
- Placez les deux articles dans le sac de plastique doublant le seau de retour de 5 gallons.
- Remarque: aucun autre matériau ne doit être placé dans cet envoi. N'incluez aucun autre métal ni mercure liquide.
- Le contenant de collecte Hg5 doit être emballé séparément.
- Placez le seau d'amalgame dans la boîte d'expédition.

Remplir le formulaire de recyclage des déchets d'amalgame:

- Remplissez la Partie 1 du (Formulaire de profil pour le recyclage des déchets d'amalgame).
- Signez et datez le bas du formulaire.
- Placez le formulaire rempli dans la boîte de retour d'expédition.
- Notez le code d'expédition inscrit sur le couvercle du seau avant de passer à l'étape suivante.
- Utilisez l'attache torsadée fournie pour fermer le sac de plastique intérieur et placez-le dans le seau d'amalgame de 5 gallons.
- Placez le seau d'amalgame dans la boîte d'expédition.

Comment trouver votre code d'expédition:



Remarque: si aucun code d'expédition n'apparaît sur le couvercle, appelez au 800.216.5505 pour obtenir des renseignements sur le recyclage.

Procédure d'expédition:

- Repérez le (Code d'expédition) (voir ci-dessous) avant d'emballer le contenant.
- Visitez Solmetex.com et cliquez sur le bouton (Recycling Shipping Label) sur la page d'accueil, ce qui vous dirigera vers My Solutions Center.
- Connectez-vous à My Solutions Center avec votre adresse courriel et votre mot de passe.
- Sélectionnez le produit — (6 Gallon or (5 Gallon) disposal for Upper Chamber) selon la taille du seau utilisé.
- Entrez votre code d'expédition situé sur le couvercle du seau d'amalgame, puis sélectionnez (Submit).
- Un nouvel écran affichera votre étiquette. Remarque: vous devrez peut-être désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles.
- Imprimez l'étiquette, placez-la dans l'enveloppe pour bordereau d'expédition, retirez la pellicule protectrice de l'enveloppe et fixez-la sur la boîte pour le ramassage UPS, ou appelez au 1-800-742-5877 pour planifier un ramassage gratuit.



Une étiquette UPS par boîte d'expédition Solmetex. Les étiquettes ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

Certificat de recyclage:

- Visitez My Solutions Center pour récupérer votre certificat de recyclage. Veuillez noter: le traitement des certificats de recyclage peut prendre jusqu'à 30 jours à partir de la date d'expédition au recycleur.



Formulaire de profil pour le recyclage des déchets d'amalgame



Dentistry's Complete
Provider of Water Solutions

30 Bearfoot Road

Northborough, MA 01532

Veuillez remplir les champs indiqués en vert. Dactylographiez ou écrivez à l'encre.

Date de réception:	
Nom / description du déchet : Amalgame dentaire utilisé	
Procédé générant le déchet: Amalgame dentaire utilisé provenant d'établissements dentaires	
Information sur le générateur	
Nom du cabinet ou du dentiste:	
Adresse d'expédition (rue, ville, état/province, code postal):	
Nom de la personne-ressource:	Adresse courriel:
Téléphone:	Télécopieur (si applicable):

Information DOT/EPA		
Nom d'expédition D.O.T.: Amalgame dentaire utilisé destiné au recyclage, DOT non réglementé (< 1 lb de mercure)		
Groupe d'emballage: Aucun	Classe de danger: Aucune	UN/NA: Aucun
Quantité à déclarer:	ERG#:	Codes de déchets E.P.A.: S/O (Si applicable)
Description physique du déchet: Amalgame dentaire désinfecté utilisé		

Composition chimique – Constituants: (Doit totaliser 100 %)	% total	TCLP (MG/L)	TCLP (MG/L)
Mercure (< 1 lb)	Jusqu'à 50 %		
Argent, zinc, autres métaux	Jusqu'à 50 %		
Solution javellissante	Jusqu'à 50 %		

Certification

Je certifie par la présente que j'ai personnellement examiné et que je connais bien les renseignements soumis dans ce document et tous les documents joints.

Signature

Nom/Titre en lettres moulées

Date

Mercury Recyclers International
PO Box 62686
Palm Bay, FL 32906
1-888-626-0694

APPROBATION #

(Usage réservé à MRI)

du Contenant de Collecte Hg5®

Procédure de Remplacement et de Recyclage

Séparateur d'amalgame Hg5®

Votre contenant de collecte **doit être remplacé tous les douze (12) mois ou lorsque le niveau de sédiments atteint la ligne plein, selon la première éventualité**. Vérifiez le niveau de sédiments du contenant de collecte chaque semaine.



Contenant
de Collecte


AVERTISSEMENT

Le flux de déchets traité par le Hg5® provient d'un système d'aspiration dentaire et peut donc contenir des concentrations de mercure et d'argent sous forme solide et soluble.

- Portez toujours un équipement de protection lors de la manipulation des contenants de collecte Hg5® pleins (gants de latex, lunettes de sécurité ou écran facial) et éliminez-les conformément aux règlements et codes locaux.
- Les contenants de collecte pleins doivent être manipulés, entreposés et éliminés conformément aux règlements applicables aux déchets dangereux contenant du mercure.
- Tout déversement doit être considéré comme dangereux et traité conformément aux procédures normalisées de manipulation des matières dangereuses.

Contenu de la Trousse de Recyclage

- Un (1) guide d'instructions pour le contenant de collecte Hg5
- Un (1) contenant de collecte Hg5
- Deux (2) embouts d'emballage recyclables
- Un (1) couvercle encliquetable
- Un (1) sac de recyclage en plastique
- Une (1) boîte d'expédition pour recyclage
- Une (1) bande de ruban d'emballage de 15 po
- Deux (2) bandes de ruban d'emballage de 6 po
- Une (1) enveloppe pour bordereau d'expédition de retour

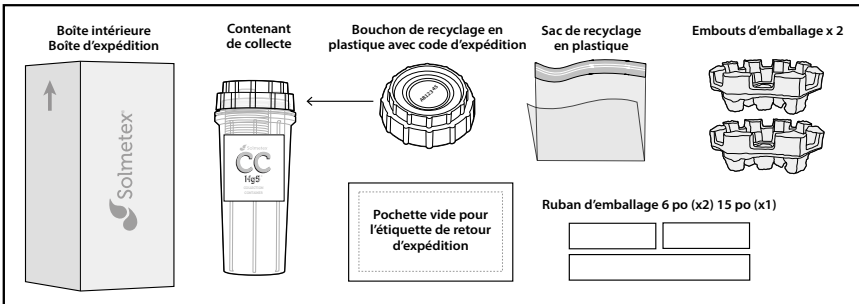



IMPORTANT

Laissez le système d'aspiration fonctionner pendant toute la procédure de remplacement du contenant de collecte.

- Si vous utilisez un système d'aspiration à vitesse variable, consultez le guide d'utilisation du fabricant. Assurez-vous qu'au moins une valve d'aspiration est ouverte et que le système d'aspiration est en fonction avant de remplacer le contenant de collecte.
- Cette procédure doit être effectuée uniquement lorsqu'aucune salle opératoire n'est utilisée, puisqu'une perte d'aspiration au fauteuil pourrait se produire.
- Notez la lecture du manomètre d'aspiration avant de remplacer le contenant de collecte, puisque cette lecture devrait demeurer inchangée après le remplacement du contenant de collecte.

Retrait du contenant de collecte usagé




1. **Conservez la boîte intérieure et les embouts d'emballage pour le retour de votre contenant de collecte plein.**
2. Retirez le nouveau contenant de collecte de la boîte intérieure. **En laissant le système d'aspiration en marche**, retirez le contenant de collecte plein du système Hg5® comme suit:
 - a. Soutenez le contenant de collecte d'une main tout en retirant les goupilles de retenue de l'autre main.
 - b. Inclinez le contenant de collecte sur le côté pour relâcher le vide, puis tirez-le vers le bas pour le retirer.

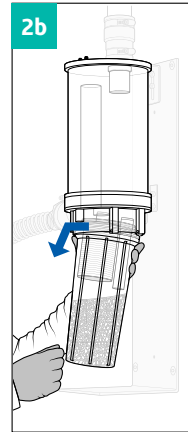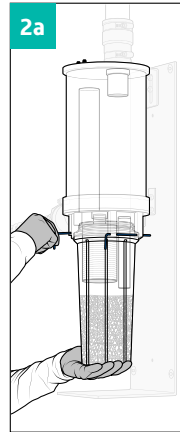

Installer le nouveau contenant de collecte:

3. **Pendant que le système d'aspiration fonctionne toujours**, installez votre nouveau contenant de collecte:

- a. Le contenant de collecte ne peut être installé que dans un seul sens. Notez l'alignement des raccords du contenant avec les ouvertures réceptrices de l'unité supérieure.

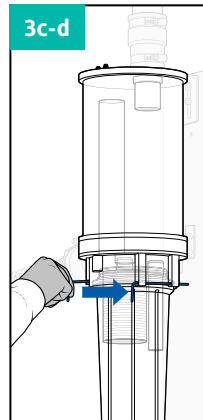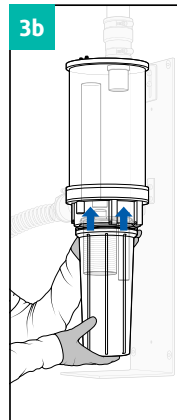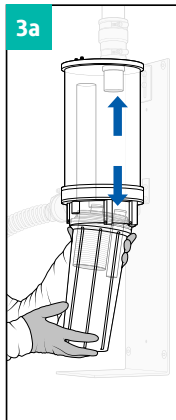

- b. Insérez doucement les raccords dans les ouvertures réceptrices. Cela peut être accompli en balançant légèrement le contenant de collecte. Les joints toriques des raccords devraient s'insérer facilement dans les récepteurs de l'unité supérieure.
- c. Continuez à pousser le contenant de collecte dans l'unité supérieure jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
- d. Insérez les goupilles de retenue dans leurs ouvertures jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. Le contenant de collecte est maintenant verrouillé.

4. Remplissez les renseignements sur l'étiquette:
 - a. Inscrivez la "Date d'installation" sur le nouveau contenant de collecte.
 - b. Inscrivez la "Date du prochain remplacement" sur le nouveau contenant de collecte.
5. La lecture du manomètre devrait être identique après le remplacement du contenant de collecte.

La lecture du vacuomètre devrait être la même après le remplacement du contenant de collecte.


Recycler le contenant de collecte

IMPORTANT

Repérez et notez le "code d'expédition" situé sur le couvercle encliquetable avant d'emballer le contenant. Il sera requis pour obtenir l'étiquette de retour d'expédition UPS.


AVERTISSEMENT ⚠

Emballer et expédier immédiatement le contenant de collecte afin d'éviter tout risque de fuite ou d'exposition aux déchets.

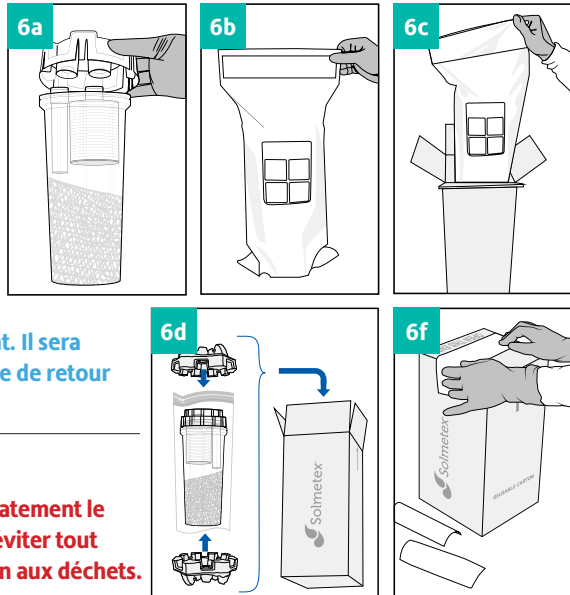

6. Scellage et emballage sécuritaire pour l'expédition:

- a. Alignez le couvercle encliquetable avec les buses du contenant de collecte. Appuyez fermement afin de verrouiller le couvercle en place.
- b. Placez le contenant de collecte plein dans le sac de recyclage en plastique fourni. Suivez les instructions indiquées sur le sac pour assurer une fermeture étanche empêchant les fuites pendant l'expédition.
- c. Placez le sac de plastique dans l'embout inférieur d'emballage et insérez-le dans la boîte d'expédition.
- d. Placez l'embout d'emballage supérieur sur le couvercle encliquetable afin de sécuriser le contenant dans la boîte pour l'expédition.
- e. Fermez la boîte de retour et préparez-la pour l'expédition.
- f. À l'aide d'une éponge humide, mouillez soigneusement la bande de ruban d'emballage de 15 po et appliquez-la sur la couture centrale. Mouillez également chaque bande de ruban de 6 po et appliquez-les sur les coutures des extrémités de la boîte afin d'assurer une fermeture hermétique.

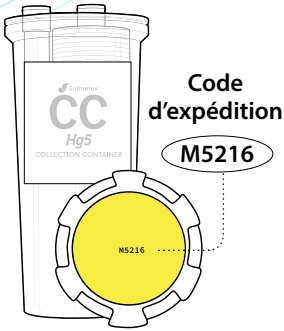

Nous vous recommandons d'inscrire ce code à l'extérieur de la boîte d'expédition.

Instructions relatives à l'étiquette d'expédition:

Ayez votre "Code d'expédition" à portée de main. Il s'agit du numéro unique figurant sur le couvercle supérieur de l'ancien contenant de collecte, qui a été noté avant que la boîte ne soit scellée. Si vous ne disposez pas de cette information, communiquez avec notre service à la clientèle par clavardage au Solmetex.com ou par téléphone au 1.800.216.5505.



Avant de commencer: Votre étiquette UPS s'affichera dans une nouvelle fenêtre. Assurez-vous que votre navigateur autorise les fenêtres contextuelles (pop-ups) provenant de ce site ou désactivez votre bloqueur de fenêtres contextuelles avant de poursuivre.

1. Visitez www.solmetex.com et cliquez sur le bouton "Étiquette d'expédition pour le recyclage" sur la page d'accueil. Vous serez ensuite dirigé vers le portail de conformité.
2. Connectez-vous au portail de conformité et repérez l'option "Imprimer l'étiquette d'expédition" à l'écran. Si c'est votre première connexion au portail, mais que votre cabinet possède déjà un compte, suivez les instructions pour "Enregistrer" votre nouveau compte utilisateur. C'est simple ! Si votre cabinet est nouveau chez Solmetex, communiquez avec le service à la clientèle (par clavardage ou par téléphone) afin de créer votre accès au portail. Vous aurez besoin d'un compte pour télécharger vos certificats de recyclage.
3. Dans le portail, cliquez sur "Print Recycling Label", situé du côté gauche de l'écran.
 - a. Sélectionnez le type de produit et saisissez le code d'expédition situé sur le couvercle, puis cliquez sur "Soumettre".
4. Votre étiquette d'expédition UPS s'affichera. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que les bloqueurs de fenêtres contextuelles sont désactivés.
5. Imprimez l'étiquette UPS, insérez-la dans l'enveloppe pour bordereau d'expédition fournie, retirez la pellicule protectrice de l'enveloppe et apposez-la sur la boîte pour le ramassage par UPS, ou **appelez UPS au 1-800-742-5877 pour planifier un ramassage GRATUIT de ce colis.**



Remarque: Les étiquettes d'expédition UPS sont associées au Code d'expédition unique de votre contenant de collecte et ne peuvent pas être réutilisées pour d'autres envois. Toute discordance entre les étiquettes et le contenu expédié pourrait avoir une incidence sur vos documents de conformité aux exigences de l'EPA.

Accéder à vos certificats de recyclage:

- Pour accéder à votre certificat de recyclage, visitez solmetex.com et cliquez sur le lien vers le portail de conformité dans la barre de menu.
- Connectez-vous au portail à l'aide de votre adresse courriel et de votre mot de passe, puis sélectionnez l'onglet (Certificats de recyclage). À partir de cette section, vous pourrez consulter, imprimer, télécharger et enregistrer le fichier PDF sur votre ordinateur.

Veuillez noter que le traitement des certificats de recyclage peut prendre jusqu'à 45 jours à compter de la date d'expédition au recycleur.